

Kick The Tick przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy, 1 szt.



Cena: 10,09 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ICB PHARMA SP.J.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Kick the Tick przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy jest używany do udzielenia pierwszej pomocy w przypadkach zaatakowania przez kleszcze. Kształt przyrządu dopasowany jest do budowy kleszcza, co umożliwi sprawne i samodzielne usunięcie żerującego pasożyta. Zastosowanie przyrządu ogranicza możliwość transmisji czynników zakaźnych podczas wykonywania zabiegu usunięcia kleszcza.

Zastosowanie:

Do usuwania kleszczy przyczepionych do skóry ludzi i zwierząt.

Sposób użycia:

Przy pomocy odpowiednio dobranej końcówki przyrządu do usuwania kleszczy należy mocno uchwycić przyczepionego kleszcza jak najbliżej powierzchni skóry. Zdecydowanym ruchem ku górze wyciągnąć kleszcza. Sprawdzić, czy w miejscu wkłucia nie pozostały jeszcze fragmenty ciała kleszcza. Zdezynfekować miejsce po usunięciu kleszcza. Dokonać utylizacji usuniętego kleszcza lub umieścić w próbówce w celu wykonania badań laboratoryjnych. Po użyciu przyrządu należy go zdezynfekować oraz dokładnie umyć ręce lub zdezynfekować.

Zawartość opakowania:

1 przyrząd do usuwania kleszczy.

Ważne wskazówki:

Wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji używania.

W przypadku stosowania wyrobu u dzieci zabieg należy przeprowadzić pod kontrolą osoby dorosłej.

Po użyciu wyrób należy zdezynfekować.

Nie używać wyrobu w przypadku jego uszkodzenia.

Zachować ostrożność.

Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania.

Wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu.