

Kleszcz Out - Przyrząd do usuwania kleszczy Sanity, 1 szt.



Cena: 18,81 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Właściwości i zastosowanie:

Przyrząd do usuwania kleszczy Kleszcz Out jest prostą w użyciu pompką, która pozwoli szybko i precyzyjnie pozbyć się kleszcza z ciała. Wszechstronna i wysokiej jakości pompka poradzi sobie nie tylko z kleszczem, ale również zassie jad po ukąszeniu – komarów, pszczoł, czy nawet żmij i skorpionów.

Produkt dedykujemy osobom aktywnym, spędzającym dużo czasu na wypoczynku, spacerach, podczas grzybobrania lub pracy w plenerze.

Działanie:

Powstała w końcówce pompki próżnia powoduje "wysanie" kleszcza z ciała i nie pozostawia żadnych części pasożyta w ciele człowieka. Przyrząd jest najbardziej skuteczny we wstępnym okresie wszczęcia się kleszcza. W przypadkach bardziej skomplikowanych należy niezwłocznie udać się do lekarza. Dzięki zastosowaniu bardzo szczelnej, gumowej uszczelki, skuteczność działania pompki jest zagwarantowana na bardzo długi czas.

Sposób użycia:

1. Aby przygotować przyrząd do użycia, należy wcisnąć gumowy tłok do oporu.
2. Przyłożyć końcówkę do ciała w miejscu wszczęcia się kleszcza (wprowadzenia jadu).
3. Docisnąć przyrząd do ciała i tak utrzymując docisk, stopniowo, powoli odciągać tłok do odpowiedniej pozycji. Miejsce ukąszenia powinno znajdować się w centralnej części przyłożenia końcówki.
4. Przytrzymać przyrząd w tej pozycji około 10-15 sekund, w razie potrzeby powtórzyć zabieg.
5. Zdezynfekować miejsce ukąszenia środkami odkażającymi.
6. Końcówkę przyrządu przemywać wodą z mydłem, zdezynfekować środkiem odkażającym.

