

Komora inhalacyjna AeroChamber Plus Flow VU z dużą maską (od lat 5 +), 1 szt.



Cena: 113,21 zł

Opis słownikowy

Postać	Komora inhalacyjna
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	KOBU MEDICAL SOLUTIONS
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

AeroChamber Plus Flow-Vu to komora inhalacyjna umożliwiająca podanie leku aplikowanego za pomocą inhalatora bez konieczności koordynowania wdechu z uruchomieniem inhalatora. Produkt pozwala także na dostarczenie większej ilości cząsteczek leku do płuc, minimalizując jego kumulację w górnych drogach oddechowych.

Skład

Bez dodatku lateksu.

Zawartość opakowania

W opakowaniu znajduje się 1 komora inhalacyjna z maską dla dorosłych.

Działanie

AeroChamber Plus Flow-Vu znacznie zwiększa dyspozycję inhalowanego leku w płucach i jednocześnie zmniejsza jego dyspozycję w górnych drogach oddechowych, co przekłada się na zmniejszenie ilości działań niepożądanych.

Przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony jest do stosowania z inhalatorami ciśnieniowymi z odmierzoną dawką (pMDI) lub inhalatorami typu Soft Mist. Może być używany przez osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci powyżej 5 roku życia.

Sposób użycia wyrobu medycznego

1. Ściągnij zatyczkę z inhalatora, bezpośrednio przed użyciem wstrząśnij nim zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w jego instrukcji obsługi.

2. Włóż inhalator do tylnej ścianki komory.
3. Przyłóż maskę do twarzy, tak aby szczelnie do niej przylegała. Dobrze założona maska sprawi, że w trakcie wdechu i wydechu wprawiony w ruch zostanie wskaźnik Flow-Vu.
4. Zrób wydech i z początkiem wolnego wdechu naciśnij inhalator.
5. Przytrzymaj maskę i wykonaj przez komorę jeszcze 5-6 wdechów i wydechów.

Świszczący dźwięk sygnalizuje wykonanie zbyt szybkiego wdechu, oddychaj wolniej.

Stosowanie produktu

Należy podawać 1 dawkę leku na raz. Częstotliwość i czas pomiędzy kolejnymi powtórzeniami zabiegu określona jest w instrukcji dołączonej do inhalatora.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Produktu nie należy gotować ani sterylizować

Uwagi i środki ostrożności

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek uszkodzeń lub brakujących elementów należy niezwłocznie wymienić komorę na nową. Wyrób należy umyć przed pierwszym użyciem oraz czyścić średnio raz na tydzień. Instrukcja czyszczenia znajduje się w instrukcji obsługi dołączonej do opakowania,

Wymieniać co 12 miesięcy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Komorę inhalacyjną stosować można u dzieci powyżej 5 roku życia oraz u młodzieży.

Producent/Podmiot odpowiedzialny

Trudell Medical International
725 Third Street
N5V 5G4 Ontario, Kanada

Dystrybutor

NZ Techno Sp. z o.o.
Berneńska 5a
03-976 Warszawa