

# Komora inhalacyjna AeroChamber Plus Flow VU z małą maską (od 0-18 m), 1 szt.



Cena: 112,02 zł

## Opis słownikowy

Postać	Komora inhalacyjna
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	TRUDELL MEDICAL
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

AeroChamber Plus Flow-Vu to komora inhalacyjna dla niemowląt od urodzenia do 18 miesiąca życia umożliwiająca podanie leku aplikowanego za pomocą inhalatora bez konieczności koordynowania wdechu z uruchomieniem inhalatora. Produkt pozwala także na dostarczenie większej ilości cząsteczek leku do płuc, minimalizując jego kumulację w górnych drogach oddechowych.

### Skład

Bez dodatku lateksu.

### Zawartość opakowania

W opakowaniu znajduje się 1 komora inhalacyjna z maską dla niemowląt.

### Działanie

AeroChamber Plus Flow-Vu znacznie zwiększa dyspozycję inhalowanego leku w płucach i jednocześnie zmniejsza jego dyspozycję w górnych drogach oddechowych, co przekłada się na zmniejszenie ilości działań niepożądanych.

### Przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony jest do stosowania z inhalatorami ciśnieniowymi z odmierzoną dawką (pMDI) lub inhalatorami typu Soft Mist.

### Sposób użycia wyrobu medycznego

1. Ściągnij zatyczkę z inhalatora, bezpośrednio przed użyciem wstrząśnij nim zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w jego instrukcji obsługi.
2. Włóż inhalator do tylnej ścianki komory.
3. Przyłóż maskę do twarzy, tak aby szczelnie do niej przylegała. Dobrze założona maska sprawi, że w trakcie wdechu i wydechu wprowadzony w ruch wskaźnik Flow-Vu.
4. Zrób wydech i z początkiem wolnego wdechu naciśnij inhalator.

5. Przytrzymaj maskę i wykonaj przez komorę jeszcze 5-6 wdechów i wydechów.

Świszczący dźwięk sygnalizuje wykonanie zbyt szybkiego wdechu, oddychaj wolniej.

#### **Stosowanie produktu**

Należy podawać 1 dawkę leku na raz. Częstotliwość i czas pomiędzy kolejnymi powtórzeniami zabiegu określona jest w instrukcji dołączonej do inhalatora.

#### **Przeciwwskazania i środki ostrożności**

Produktu nie należy gotować ani sterylizować

#### **Uwagi i środki ostrożności**

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek uszkodzeń lub brakujących elementów należy niezwłocznie wymienić komorę na nową. Wyrób należy umyć przed pierwszym użyciem oraz czyścić średnio raz na tydzień. Instrukcja czyszczenia znajduje się w instrukcji obsługi dołączonej do opakowania, Wymieniać co 12 miesięcy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### **Stosowanie u dzieci i młodzieży**

Specjalna mała maska umożliwia stosowanie wyrobu u dzieci od urodzenia do 18 miesiąca życia.

#### **Producent/Podmiot odpowiedzialny**

Trudell Medical International  
725 Third Street  
N5V 5G4 Ontario, Kanada

#### **Dystrybutor**

NZ Techno Sp. z o.o.  
Berneńska 5a  
03-976 Warszawa