

Komora inhalacyjna AeroChamber Plus Flow VU z ustnikiem (uniwersalna), 1 szt.



Cena: 67,97 zł

Opis słownikowy

Postać	Komora inhalacyjna
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	KOBU MEDICAL SOLUTIONS
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

AeroChamber Plus Flow-Vu to komora inhalacyjna z ustnikiem umożliwiającą podanie leku aplikowanego za pomocą inhalatora bez konieczności koordynowania wdechu z uruchomieniem inhalatora. Produkt pozwala także na dostarczenie większej ilości cząsteczek leku do płuc, minimalizując jego kumulację w górnych drogach oddechowych.

Skład

Bez dodatku lateksu.

Zawartość opakowania

W opakowaniu znajduje się 1 komora inhalacyjna z ustnikiem.

Działanie

AeroChamber Plus Flow-Vu znacznie zwiększa dyspozycję inhalowanego leku w płucach i jednocześnie zmniejsza jego dyspozycję w górnych drogach oddechowych, co przekłada się na zmniejszenie ilości działań niepożądanych.

Przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony jest do stosowania z inhalatorami ciśnieniowymi z odmierzoną dawką (pMDI) lub inhalatorami typu Soft Mist. Może być używany przez osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci powyżej 5 roku życia.

Sposób użycia wyrobu medycznego

1. Ściągnij zatyczkę z inhalatora, bezpośrednio przed użyciem wstrząśnij nim zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w jego

- instrukcji obsługi.
2. Włóż inhalator do tylnej ścianki komory.
 3. Włóż ustnik do jamy ustnej, szczelnie obejmując go ustami. Dobrze włożony ustnik sprawi, że w trakcie wdechu i wydechu wprawiony w ruch zostanie wskaźnik Flow-Vu.
 4. Zrób wydech i:
 - Z początkiem powolnego, głębokiego wdechu naciśnij inhalator, zatrzymaj oddech na 5-10 sekund.
 - Z początkiem powolnego wdechu naciśnij inhalator, następnie wykonaj przez komorę jeszcze 2-3 wdechy i wydechy.

Świszczący dźwięk sygnalizuje wykonanie zbyt szybkiego wdechu, oddychaj wolniej.

Stosowanie produktu

Należy podawać 1 dawkę leku na raz. Częstotliwość i czas pomiędzy kolejnymi powtórzeniami zabiegu określona jest w instrukcji dołączonej do inhalatora.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Produktu nie należy gotować ani sterylizować

Uwagi i środki ostrożności

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek uszkodzeń lub brakujących elementów należy niezwłocznie wymienić komorę na nową. Wyrób należy umyć przed pierwszym użyciem oraz czyścić średnio raz na tydzień. Instrukcja czyszczenia znajduje się w instrukcji obsługi dołączonej do opakowania, Wymieniać co 12 miesięcy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Komorę inhalacyjną stosować można u dzieci powyżej 5 roku życia oraz u młodzieży.

Producent/Podmiot odpowiedzialny

Trudell Medical International
725 Third Street
N5V 5G4 Ontario, Kanada

Dystrybutor

NZ Techno Sp. z o.o.
Berneńska 5a
03-976 Warszawa