

Komora inhalacyjna Babyhaler dla dzieci i niemowląt, 1 szt.

Cena: 124,91 zł



Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	GSK SERVICES SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

Opis produktu

Inhalator BABYHALER dla dzieci

Ilość: 1 sztuka

Skład zestawu:

- * maseczka na twarz
- * zastawka zewnętrzna i wewnętrzna
- * pokrywka zastawki zewnętrznej
- * uchwyt do dozownika
- * osłona ustnika

Opis produktu:

Inhalator BABYHALER jest urządzeniem ułatwiającym podawanie dzieciom leków w postaci aerozoli wziewnych pod ciśnieniem przy infekcjach dróg oddechowych. Zabieg nie powoduje żadnych skutków ubocznych, a stosowany regularnie, szybko pozwala na pozbycie się uciążliwych dolegliwości przeziębieniowych. Produkt wyposażony jest w miękką maseczkę, którą przykładą się do nosa i ust dziecka. Maseczka na twarz produkowana jest w dwóch rozmiarach. Aparat wyposażony jest w jedną o wielkości typowej dla większości dzieci. Komora inhalacyjna pozwala upewnić się, że dziecko dostaje

za każdym razem odpowiednią dawkę leku.

Przeznaczenie:

Komora inhalacyjna Babyhaler jest przeznaczona do podawania leków wziewnych dla niemowląt i małych dzieci przy infekcji dróg oddechowych

Instrukcja obsługi inhalatora Babyhaler:

1. Przed użyciem komory inhalacyjnej po raz pierwszy, należy zapoznać się ze sposobem jej stosowania. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.
2. Przed użyciem należy sprawdzić, czy obie zastawki aparatu działają prawidłowo. Należy ustawić komorę inhalacyjną na wprost twarzy i przycisnąć maseczkę do ust. Trzymając przyrząd w tej pozycji widzi się obie niebieskie zastawki. Wykonać spokojnie wdech i wydech przez maseczkę. Podczas wydechu powinna poruszyć się lekko zastawka górna, podczas wdechu - odwrotnie.
3. Należy zdjąć osłonę ustnika i silnie potrząsnąć dozownikiem.
4. Wcisnąć lekko dozownik z lekiem w jego uchwyt. Ustnik powinien być skierowany w głąb aparatu.
5. Ilość dawek leku, które powinno dziecko każdorazowo otrzymać, zależy od wskazań lekarza. Należy pamiętać, że do aparatu podaje się za każdym razem tylko jedną dawkę.
6. Przytrzymać dziecko. Komorę inhalacyjną Babyhaler przytrzymać poziomo na wprost twarzy dziecka. Nacisnąć kciukiem jeden raz dozownik z lekiem, wprowadzając jedną porcję leku do komory aparatu. Następnie tak szybko, jak to możliwe, przyłożyć maseczkę do ust i nosa dziecka zwracając uwagę, aby maseczka szczelnie je obejmowała.
7. Przytrzymać komorę inhalacyjną Babyhaler, póki dziecko nie wykona 5-10 wdechów (przez ok. 15 sek.). Po odpowiednim czasie odłożyć komorę inhalacyjną.
8. Jeśli lekarz zlecił dziecku dwie dawki leku, powtarza się postępowanie opisane w punktach 5 i 6.
9. Wyjąć dozownik z lekiem z aparatu. Nałożyć osłonę na ustnik dozownika.
10. Komora inhalacyjna Babyhaler powinna być przechowywana w woreczku ochronnym.

Sposób czyszczenia inhalatora Babyhaler:

1. Komora inhalacyjna Babyhaler powinna być czyszczona regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. W tym celu przyrząd należy rozłożyć na części:
2. Wyjąć dozownik z lekiem. Delikatnie zdjąć maseczkę.
3. Lekko naciskając kciukiem i palcem wskazującym wyłobione zaciski, odciągnąć część z zewnętrzną zastawką.
4. Aby rozdzielić dwie ostatnie części, nacisnąć dwa pozostałe zaciski.
5. Chwycić kciukiem i palcem wskazującym wystający środek zastawki i delikatnie wyjąć z uchwytu. Uważać, by nie uszkodzić zastawki. Należy trzymać ją pośrodku, nie za brzeg.
6. Otworzyć pokrywkę zastawki zewnętrznej, chwycić ją pośrodku kciukiem i palcem wskazującym i delikatnie wyjąć z uchwytu.
7. Wszystkie części umyć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnych środków do zmywania. Na koniec dokładnie wypłukać ciepłą wodą i wysuszyć w temperaturze pokojowej.
8. Należy złożyć z powrotem wszystkie części inhalatora i schować je do woreczka ochronnego