

Kompres żelowy (rozmiar:21 cm x 22cm) SANITY ciepły/zimny, 1 szt.



Cena: 27,29 zł

Opis słownikowy

Postać	Okład żelowy
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Zastosowanie:

Kompres żelowy flex medium polecany dla osób po przebytych urazach układu mięśniowo-szkieletowego, zmagających się z migreną i bólem reumatoidalnym, jako uzupełnienie domowej apteczki do stosowania podczas gorączki, bólu zęba, siniakach i krwiakach.

Właściwości:

- Kompres flex medium Sanity 21cm x 22cm
- Professional & flexible
- Elastyczny nawet przy -18°C

Kompres żelowy ciepły/zimny sanity 21x22 cm pomaga w urazach i wspomaga leczenie przewlekłego bólu:

- Do leczenia drobnych urazów większych powierzchni – uda, plecy, brzuch
- Kompres żelowy zimno-ciepły, dwa sposoby użycia
- Można podgrzewać w kuchenke mikrofalowej
- Doskonały zamiennik leczenia farmakologicznego
- Możliwość wielokrotnego zastosowania
- Bezpieczny dla dziecka
- Przyjazny dla środowiska
- Wygodny i praktyczny

Zimne okłady

Pomaga w urazach, takich jak skręcenia i zwichnięcia stawów dłoni, stłuczenia ręki, naderwanie ścięgien. Łagodzi przewlekły ból spowodowany urazami układu mięśniowo-szkieletowego, a także bóle zębów i głowy. Zmniejsza obrzęk, stany zapalne, zaczerwienienia. Przyspiesza wchłaniania krwiaków, siniaków, łagodzenia drobnych stłuczeń. Obniża temperaturę ciała w trakcie gorączki, łagodzi poparzenia. Pomaga zatamować krwotok z nosa.

Ciepłe okłady

Wspomaga leczenie przewlekłego bólu mięśniowo-szkieletowego. Ogranicza skurcze mięśni (np. ból pleców, bóle menstruacyjne, skurcze nóg). Przynosi ulgę w trakcie reumatoidalnego zapalenia stawów i bólu.

Sposób użycia:

Zimne okłady - umieść kompres w zamrażarce na minimum 2 godziny

Ciepłe okłady - w kuchence mikrofalowej podgrzewaj ok. 4 minuty w temperaturze rozmrażania lub zanurz kompres w gorącej wodzie na ok. 5 minut.

Osusz, włóż do ochronnego pokrowca, a następnie zastosuj na ciało.

Nie należy stosować kompresu bezpośrednio na rany. Przeciwwskazania do stosowania znajdują się w załączonej wewnątrz opakowania broszurze informacyjnej.