

Kompres żelowy zimno-ciepły 28 x 34cm, 1 szt.



Cena: 42,01 zł

Opis słownikowy

Postać	Okład żelowy
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	RESMED
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Kompresy są wykonane ze specjalnego nietoksycznego organicznego żelu i nietoksycznej folii. Podstawową zaletą żelu jest długotrwałe oddawanie skumulowanego ciepła lub zimna. W trakcie eksploatacji w żelu nie zachodzą żadne zmiany chemiczne. Po zamrożeniu kompres pozostaje nadal elastyczny i daje się modelować do ciała pacjenta. Kompresy bardzo dobrze sprawdzają się zarówno w terapii ciepłem jak i terapii zimnem, są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie siłę naturalnego leczenia.

Stosowane są do:

Terapia zimnem:

- przeciwzapalne,
- przeciwbólowe,
- przeciwobrzękowe,
- przeciwkrwotoczne,
- choroby narządu ruchu
 - (stłuczenia, urazy, złamania, zapalenia, zwichnięcia),
- choroby reumatyczne
 - (zapalenie stawów, dna moczanowa),
- choroby układu krążenia,
- choroby układu nerwowego,
- choroby układu pokarmowego.

Terapia ciepłem

- choroby narządu ruchu,

- stłuczenia, krwiaki, urazy,
- choroby reumatyczne,
- choroby układu moczowego,
- choroby układu krążenia,
- choroby układu oddechowego,
- choroby układu nerwowego,
- choroby dermatologiczne.

Nie stosować w przypadku (terapia zimnem)

Leczenie zimnem nie jest zalecane dla osób z stanem zapalnym w przewlekłym okresie choroby, nadwrażliwością na zimno, zespołem Raynauda, zapaleniem pęcherza moczowego i miedniczek nerkowych, zapaleniem naczyń, ciężkimi schorzeniami serca i naczyń, odmrożeniem, zespołem Sudecka oraz w stanie wyniszczenia i ogólnego osłabienia.

W razie wątpliwości przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie stosować w przypadku (terapia ciepłem)

Wszelkie zabiegi ciepłne o działaniu miejscowym, są przeciwwskazane w przypadkach ostrego okresu choroby, urazu kości i stawów (złamanie), zmian zwyrodnieniowych i zniekształcających stawy w przypadku odwapnienia kości, odmrożenia, owrzodzenia podudzi czy gruźlica kostno – stawowa. Stosowane do powszechnego użytku przez osoby nie wykwalifikowane po uprzedniej konsultacji lekarskiej.

Środki ostrożności:

Należy zachować ostrożność podczas stosowania kompresu, aby uniknąć urazów tkanki skórnej oraz powierzchniowych uszkodzeń nerwów, zwłaszcza u osób z upośledzeniem czucia. Dzieci oraz osoby z zaburzeniami poznawczymi powinny używać kompresu pod nadzorem dorosłych. Jeżeli podczas stosowania kompresu odczuwana jest jakakolwiek niedogodność należy bezzwłocznie przerwać terapię.

Przechowywanie:

Kompres należy przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i zacienionym miejscu.

Kompres przeznaczony do terapii zimnem można przechowywać w ujemnych temperaturach (np. zamrażalnik).

Firma RESMED pracuje zgodnie z zasadami systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych PL/DR014991