

Lancety Optilets, 100 szt.

Cena: 16,41 zł



Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	DIAGNOSIS S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Instrukcja użycia

1. Umyj ręce ciepłą wodą z mydłem i dobrze je osusz.
2. Umieść lancet w nośniku nakłuwacza.
3. Usuń nasadkę zabezpieczającą.
4. Wybierz miejsce nakłucia.
5. Wykonaj nakłucie.
6. Wykonaj pomiar poziomu glukozy zgodnie z instrukcją, oczyść miejsce nakłucia.
7. Załóż nasadkę zabezpieczającą i wyrzuć lancet do odpowiedniego pojemnika.

Dlaczego należy wymieniać lancety? Wymiana lancetu:

- minimalizuje ryzyko zakażenia;
- pozwala na łatwiejsze pobranie próbki krwi;
- zmniejsza odczucie bólu.

Ostrzeżenia dotyczące stosowania:

Lancety są jednorazowego, osobistego użytku. Nie należy używać ich ponownie.

Użycie tego samego lancetu przez osoby trzecie wiąże się z podwyższonym ryzykiem zakażenia mikrobiologicznego.

Nie używać lancetu jeśli nasadka jest uszkodzona. Nie przechowywać lancetu w nakłuwaczu.