


Menopauza Test płytkowy, 2 szt.

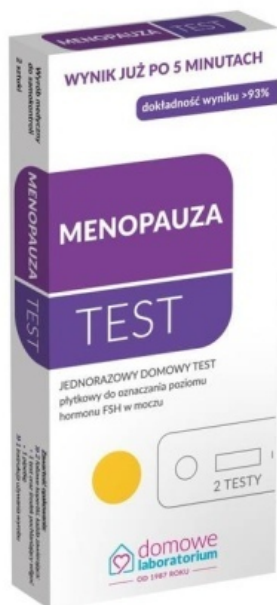

Cena: 23,05 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Dla kobiet proces klimakterium i zatrzymanie comiesięcznego cyklu jest niezwykle trudnym przeżyciem. Obok zanikania funkcji rozrodczych, kobiety zmagają się z różnego rodzaju dolegliwościami, takimi jak uderzenia gorąca czy nerwowość.

Menopauza TEST jednoznacznie wykazuje, czy nieregularne miesiączki lub ich zanik oraz złe samopoczucie związane jest ze zmianami hormonalnymi spowodowanymi wkraczaniem w okres przekwitania.

Test płytkowy Menopauza służy do wykrycia rosnącego stężenia hormonu FSH, które jest równe lub przekroczyło 25 mIU/ml. Taki wzrost jest charakterystycznym efektem poprzedzającym menopauzę, ponieważ wraz ze zmniejszającą się produkcją estrogenów i progesteronu, organizm kobiet wytwarza większość niż dotychczas ilość folikulotropiny (FSH).

Do przeprowadzenia badania wystarczy próbka z pierwszego porannego moczu, który zbieramy do suchego i czystego naczynia.

Następnie za pomocą znajdującej się w opakowaniu testu pipetki aplikujemy na okienko płytki testowej 3 krople moczu.

Wynik w postaci różowych prążków uzyskujemy po upływie 5 minut. Interpretacja po czasie dłuższym niż 10 minut nie jest już wiarygodna. W celu poprawnego przeprowadzenia badania należy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi dołączonej do opakowania.

Prezentowany Menopauza TEST zawiera 2 testy, które pozwalają przeprowadzić 2 niezależne badania. Drugie badanie należy powtórzyć dokładnie po tygodniu od wykonania pierwszego testu.

Jak wykonać badanie?

Regularność badania zależy od obserwowanych objawów przekwitania. Jeżeli miesiączka jest regularna, test należy wykonać w pierwszym tygodniu cyklu miesięcznego i powtórzyć tydzień później. Jeżeli natomiast miesiączkujesz nieregularnie, pierwszy test zrób w dowolnym dniu miesiąca i powtórz próbę po upływie kolejnych siedmiu dni.

W celu przeprowadzenia testu konieczna będzie próbka świeżego moczu. Należy go oddawać w godzinach porannych po co najmniej

5-godzinnej przerwie. Badany mocz należy pobrać zawsze do czystego i suchego naczynia.

1. Tuż przed wykonaniem próby otwórz foliową kopertkę poprzez jej rozdarcie.
2. Z koperty wyjmij test płytkowy i plastikową pipetkę.
3. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci.
4. Płytkę testową umieść na poziomej powierzchni.

Badanie rozpocznij od pobrania moczu za pomocą plastikowej pipetki.

Za pomocą ostrożnych ruchów umieść 3 krople w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu na płytce testowej. Aby uniknąć napowietrzenia, pipetę trzymaj pionowo, ok. 1 cm nad powierzchnią testu.

Uzbrój się w cierpliwość i poczekaj na efekty ok. 5 minut. Przyjmą one postać barwnych prążków, których układ stanowi o ostatecznym wyniku badania.

Jeżeli rezultat pojawi się po ponad 10 minutach, test należy uznać za nieudany.

Wynik dodatni

Jeśli rezultat badania jest dodatni, w okienku wynikowym pojawią się dwa intensywne prążki o podobnej intensywności – testowy T oraz kontrolny C. Wynik oznacza wyższy, niż przewiduje norma poziom hormonu FSH, mogący oznaczać stadium perimenopauzy. W takim wypadku należy skontaktować się z lekarzem, aby przeprowadzić dalszą diagnozę i ewentualnie podjąć terapię.

Wynik ujemny

W przypadku wyniku ujemnego obserwowana intensywność prążka T jest znacznie słabsza lub pasek nie pojawia się wcale. Wynik oznacza prawdopodobny brak stadium perimenopauzy w danym cyklu.

Wynik nieważny

Brak pojawienia się prążka kontrolnego C oznacza nieważność przeprowadzonego testu. W takim wypadku należy powtórzyć badanie, korzystając z nowego zestawu.

Objawy przekwitania pojawiają się nawet 2-3 lata przed wystąpieniem faktycznej menopauzy. Choćby z tego powodu przeprowadzenie samego badania nie wystarczy. Należy je również poprawnie zinterpretować.

W przypadku kobiet, które nie miały miesiączki przez ostatnie 12 miesięcy, dodatni wynik testu oznacza wystąpienie menopauzy. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem, potwierdzić wyniki i podjąć odpowiednią terapię.

W przypadku kobiet doświadczających objawów przekwitania, które miesiączkują, powinno się przeprowadzić podwójny test i odpowiednio odczytać ich rezultat:

- dwa wyniki dodatnie – prawdopodobny stan perimenopauzy. Należy skontaktować się z lekarzem i nie przerywać stosowania antykoncepcji.
- wynik ujemny i dodatni – prawdopodobny wczesny stan perimenopauzy. Należy zachować się podobnie jak w powyższym przypadku.
- dwa wyniki ujemne – prawdopodobny brak stanu perimenopauzy. W razie nieustąpienia objawów należy powtórzyć test za miesiąc i skontaktować się z lekarzem w celu zdiagnozowania przyczyn złego samopoczucia.