

Multi-Gyn Actigel Żel, 50 ml



Cena: 50,98 zł

Opis słownikowy

Producent /
Podmiot
Odpowiedzialny

QPHARMA SP. Z O.O.

Przechowywanie

Temperatura pokojowa

Rejestracja

Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis i wskazania do stosowania:

Preparat polecany przy dolegliwościach związanych z bakteryjnym zakażeniem pochwy:

- szare upławy,
- nieprzyjemny zapach,
- świąd,
- podrażnienia i tkliwość,
- zaczerwienienie i bolesność.

Właściwości (działanie):

Multi-Gyn ActiGel oparty jest na opatentowanym kompleksie 2QR. Ta naturalna substancja pochodzenia roślinnego w bezpieczny i naturalny sposób chroni tkanki przed szkodliwymi bakteriami. Multi-Gyn ActiGel wspiera również naturalny proces leczenia. Przywraca optymalną kwasowość pochwy (wartość pH), które wspiera rozwój pożytecznych bakterii (pałeczek kwasu mlekowego) optymalizując florę bakteryjną pochwy. Daje ulgę bezpośrednio po aplikacji. Redukuje nieprzyjemny zapach i upławy. Łagodzi świąd i pieczenie pochwy. Jest to delikatne i wysoce skuteczne leczenie bez znanych szkodliwych działań niepożądanych.

Sposób stosowania:

- W leczeniu bakteryjnego zakażenia pochwy (BV) należy dopochwowo aplikować obfitą ilość preparatu Multi-Gyn ActiGel co najmniej dwa razy dziennie przez okres co najmniej 5 dni. Zaleca się aplikację przed snem.
- W przypadku dolegliwości pochwy takich jak świąd i podrażnienia należy aplikować obfitą ilość preparatu Multi-Gyn ActiGel co najmniej raz dziennie lub każdorazowo gdy pojawią się objawy.

Preparat Multi-Gyn ActiGel nie powinien być stosowany przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni. Umożliwi to samoregulację flory

bakteryjnej pochwy bez dodatkowego wsparcia. Jeśli dolegliwości utrzymują się bądź nawracają, należy skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i inne informacje:

Alergie na składniki występujące w Multi-Gyn ActiGel są bardzo rzadkie. Jeśli masz jednak wątpliwości, nałóż niewielką ilość żelu na wewnętrzną część przedramienia. Gdy pojawią się swędzące czerwone kropki lub plamy, radzimy powstrzymać się od stosowania Multi-Gyn ActiGel.

Nie są znane żadne przeciwwskazania do stosowania Multi-Gyn ActiGel w czasie ciąży i karmienia piersią. Porozmawiaj z lekarzem o możliwościach odpowiednich dla Ciebie.

Po zastosowaniu produktu może wystąpić uczucie pieczenia i / lub mrowienia. To doznanie jest normalne i szybko ustępuje.

Składniki:

Multi-Gyn ActiGel jest preparatem naturalnym opartym na opatentowanym kompleksie 2QR*. Preparat nie zawiera substancji zapachowych, hormonów ani składników pochodzenia zwierzęcego.

Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, Xanthan Gum, Glycerin, Caprylyl Glycol

*2QR: 2QR - opatentowany składnik oczyszczony z Aloe Barbadensis.

Opakowanie:

50ml żel

Statut preparatu:

Wyrób medyczny klasy IIa

Producent:

Karo Pharma, Holandia

Informacji o preparacie udziela:

Qpharma Sp. z o.o., ul. Wichrowa 7F/10, 04-682 Warszawa, tel. (022) 590 57 00

Galeria

