

Nasodren, aerozol do nosa, 1 but.liof. po 50 mg + 1 amp.rozp. po 5 ml (+ dozownik z rozpylaczem)



Cena: 35,00 zł

Opis słownikowy

Postać	Aerozol
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SIROWA POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Nasodren, aerozol do nosa

wyrób medyczny o naturalnej formule, która bazuje na ekstrakcie ze świeżych bulw fiołka alpejskiego. Przeznaczony jest do łagodzenia objawów nieżytu nosa i zapalenia zatok, takich jak ból głowy i/lub twarzy, niedrożny nos oraz podwyższone ciśnienie w zatokach. Składniki wyrobu pomagają zapewnić ulgę już po 3 minutach od pierwszej aplikacji.

Skład

Opakowanie zawiera: 1 zestaw (dozownik + 50 mg liofilizatu + 5 ml rozpuszczalnika).

Substancja czynna: saponiny pozyskane z wyciągu z fiołka alpejskiego.

Działanie

Wyrób medyczny należy stosować w celu udrożnienia i oczyszczenia nosa oraz zatok przynosowych. Substancją czynną wyrobu są saponiny, które nie wchłaniają się do krwiobiegu i pomagają zmniejszać napięcie powierzchniowe na błonie komórkowej komórek błony śluzowej nosa. Dzięki temu wspomagają wydzielanie mucyny i redukują ilość wydzieliny w nosie. Produkt zawiera również ekstrakt z fiołka alpejskiego, który wspiera stymulację nerwu trójdzielnego, a tym samym pomaga zmniejszać produkcję wydzieliny i łagodzić stan

zapalny śluzówki. Dzięki swoim właściwościom, składniki aktywne wyrobu wspomagają obronne mechanizmy górnych dróg oddechowych.

Sposób użycia

- Zawartość plastikowej ampułki z płynem wlać do szklanej buteleczki z proszkiem. Następnie zamocować dozownik i wstrząsnąć, aby proszek całkowicie się rozpuścił.
- Ustawić głowę pionowo, nie odchylając jej w górę lub w dół.
- Wstrzymać oddech i rozpylić wyrób do każdego otworu nosowego.

Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do wyrobu.

Ostrzeżenia

Szczegółowe informacje nt. bezpieczeństwa stosowania znajdują się w instrukcji obsługi do wyrobu medycznego.