

New Caress Classic, prezerwatywy, 3 szt.

Cena: 2,87 zł



Opis słownikowy

Postać	Prezerwatywy
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	UNIMIL SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

New Caress Classic by Unimil to klasyczne prezerwatywy najwyższej jakości zapewniające bezpieczeństwo i dające naturalne doznania. Wykonane z naturalnej gumy lateksowej, posiadają gładkie ścianki oraz zbiorniczek. Pokryte są środkiem nawilżającym. Łatwe do otwarcia opakowanie zawiera 3 sztuki prezerwatyw o średnicy 52 mm. Prezerwatywy New Caress Classic to doskonała jakość w przystępnej cenie.

Zastosowanie

- Pomagają obniżyć ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową oraz ciąży.
- Antykoncepcja.

Sposób użycia

- Aby prawidłowo założyć prezerwatywę, penis musi być w stanie pełnej erekcji.
- Umyj dokładnie ręce i ostrożnie wyjmij prezerwatywę z pudełka.
- Delikatnie ściśnij zbiorniczek prezerwatywy, aby usunąć z niej powietrze i nie puszczając, przyłóż prezerwatywę do żołędzi.
- Drugą ręką rozwijaj ostrożnie prezerwatywę wzdłuż penisa do samego końca. Uważaj, aby do środka nie dostało się powietrze oraz aby nie uszkodzić prezerwatywy paznokciami.
- Po stosunku przytrzymaj prezerwatywę podczas wyjmowania członka, a następnie zwiąż ją i wyrzuć do kosza na śmieci.

Właściwości:

- Materiał: lateks kauczuku naturalnego.
- Prosty kształt ze zbiorniczkiem.

- Szerokość nominalna: 52 mm.
- Naturalny kolor.

Ważne wskazówki

Użycie prezerwatyw zgodnie z instrukcją producenta pomaga zredukować ryzyko ciąży, HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, jednak żadna metoda antykoncepcyjna nie zapewni 100% ochrony.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od promieni słonecznych.

Ostrzeżenia

Produkt jednorazowy. Po użyciu wyrzucić.

Produkt jest wykonany z lateksu kauczuku naturalnego, który może wywoływać reakcje alergiczne.

Dodatkowe informacje

Produkt testowany elektronicznie.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z załączoną instrukcją.

Zawartość opakowania

Prezerwatywy New Caress Classic by Unimil - 3 sztuki

Podmiot odpowiedzialny

Unimil Sp. z o.o.

ul. Kamieńskiego 47

30-644 Kraków