

# Nosko, aspirator do nosa, 1 zest.

Cena: 48,47 zł



## Opis słownikowy

Postać	Aspirator
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SALVEO POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Aspirator do nosa Nosko jest wyrobem medycznym, który można podłączyć do dowolnego domowego odkurzacza. Skutecznie i w bezpieczny sposób usuwa wydzielinę z nosa niemowląt i dzieci, które nie potrafią samodzielnie wydmuchać nosa. Drożny nosek pozwala dzieciom na prawidłowe oddychanie, bezpieczne karmienie i spokojny sen, co w pierwszych latach życia jest najważniejsze.

W skład zestawu Nosko set wchodzi:

- dwie końcówki do oczyszczania nosa:
- dla dzieci od 0 – 6 miesięcy,
- dla dzieci powyżej 6 miesięcy,
- szczoteczka do czyszczenia końcówki do nosa.

### Zastosowanie

Usuwanie wydzieliny z nosa niemowląt i dzieci.

### Sposób użycia

Po zatkaniu jednej dziurki nosa dziecka i włączeniu odkurzacza, należy do drugiej dziurki włożyć węższą końcówkę aspiratora. Nosko set usuwa wydzielinę działając stałym i niezmiennym ciśnieniem, niezależnie od nastawionej siły ssącej, dlatego jest delikatny dla śluzówki nosa. Po usunięciu wydzieliny z nosa, najpierw należy wyłączyć odkurzacza, a następnie odłączyć aspirator od odkurzacza. Po użyciu, aspirator należy przepłukać strumieniem gorącej wody, a końcówkę wyczyścić za pomocą dołączonej szczoteczki.