

Nurodent Żel na ząbkowanie, żel do stosowania na dziąsła, 15 ml



Cena: 29,93 zł

Opis słownikowy

| | |
|------------------------------------|--|
| Postać | Żel |
| Producent / Podmiot Odpowiedzialny | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (POLAND) SP. Z O.O. |
| Przechowywanie | Temperatura pokojowa |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

NURODENT

to szybko działający żel na ząbkowanie, wyrób medyczny o smaku różanym, stosowany w czasie ząbkowania u dzieci powyżej 6 miesiąca życia. Żel nakłada się na dziąsła, tworząc w ten sposób ochronną warstwę pomagającą łagodzić ból, dyskomfort i stan zapalny powodowany przez ząbkowanie. Bez dodatku cukru, parabenów, środków miejscowo znieczulających, sztucznych substancji słodzących, aromatów ani alkoholu.

Informacje dotyczące stosowania

Przed użyciem żelu na ząbkowanie NURODENT® należy dokładnie przeczytać instrukcję. Podane informacje podsumowują ważne wskazówki dotyczące wyrobu. W razie jakichkolwiek dalszych pytań należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub dentysty. Nałożyć czystym małym palcem odpowiednią ilość żelu, aby pokryć obolałe miejsce i delikatnie masować dziąsła. Najlepiej stosować po posiłkach i przed snem, aby wspomóc tworzenie się warstwy ochronnej na dziąśle i przedłużyć czas ulgi. Stosować 3-5 razy dziennie w zależności od potrzeb. Po każdej aplikacji należy ponownie nałożyć nakrętkę.

Przechowywanie i bezpieczeństwo

Wyrób jest przeznaczony do stosowania w obrębie jamy ustnej. Nie należy stosować, w przypadku nadwrażliwości u dziecka na którykolwiek ze składników wyrobu. W przypadku jakichkolwiek podrażnień należy zaprzestać stosowania wyrobu i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Nie należy stosować u niemowląt poniżej 6 miesiąca życia. Nie stosować po upływie daty ważności podanej na tubce i kartonie. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. NIGDY nie zostawiać wyrobu w rękach dziecka. Ryzyko zadławienia. W przypadku utrzymywania się objawów należy skonsultować się z lekarzem lub dentystą. Każda tubka zawiera 15 ml żelu do stosowania w obrębie jamy ustnej o bursztynowym kolorze i różanym smaku. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem słonecznym. Nie zamrażać. Wyrzucić 30 dni po otwarciu. Zużyta tubkę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki