


# Ocutears 0,15 %, krople do oczu, 10 ml

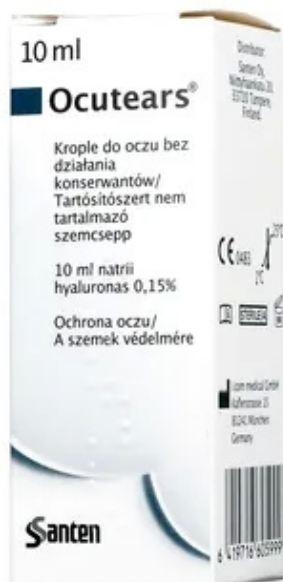

Cena: 32,98 zł

## Opis słownikowy

Postać	Krople
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SANTEN OY
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

**Opis:**  
Ocutears Wyrób medyczny w postaci kropli do oczu bez konserwantów.  
Długotrwałe złagodzenie objawów suchego oka. Mogą być używane ze wszystkimi rodzajami soczewek kontaktowych.

**Skład**  
0,15% hialuronian sodu, chlorek sodu, wodorofosforan sodu, diwodorofosforan sodu oraz woda oczyszczona.

**Działanie**  
Ocutears to sterylna, wiskoelastyczna, przezroczysta powłoka ochronna dla rogówki bez działania konserwantów.

Ocutears składa się wyłącznie z naturalnych, biologicznych substancji. Ocutears naśladuje działanie naturalnych łez, chroni, nawilża i natłuszcza powierzchnię oka.

### Wskazania do stosowania:

- Suche zapalenie rogówki i spojówki (Zespół Sjögrena)
- Urazy rogówki, nadżerek, operacja rogówki
- Noszenie soczewek kontaktowych
- Zaburzenia hormonalne (menopauza)
- Działania klimatyzacji, wiatru, zimna, suchego, ciepłego powietrza, kurzu, dymu, zanieczyszczenia powietrza
- Praca przy komputerze, długie podróże samochodem lub samolotem
- Pływanie w chlorowanej wodzie.

### Sposób użycia wyrobu medycznego

1. Przed pierwszym użyciem oderwać pierścień gwarancyjny z zakrętki; następnie preparat Ocutears można stosować przez maksymalnie 6 miesięcy.
2. Zdjąć zakrętkę.
3. Naciskając boki buteleczki wycisnąć jedną kroplę bezpośrednio na oko lub soczewkę kontaktową.
4. Zakręcić zakrętkę po zastosowaniu. 6 miesięcy po pierwszym otwarciu buteleczkę wyrzucić razem z odpadami domowymi.

Po zastosowaniu delikatny masaż powiek z zamkniętymi oczami zapewni szybsze rozprowadzenie produktu na powierzchni oka.

#### **Przeciwwskazania i środki ostrożności**

Nie stosować, jeśli pierścień gwarancyjny zakrętki jest uszkodzony.

Nie dopuszczać, by buteleczka miała kontakt z okiem.

Nie stosować w przypadku infekcji oczu.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C.

Zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego użycia.

Chronić przez mrozem.

#### **Stosowanie wyrobu z innymi lekami**

Nie stosować z innymi lekami do oczu. W przypadku równoczesnego stosowania innych kropli do oczu, odczekać co najmniej pięć minut przed zastosowaniem preparatu Ocutears.

#### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Po zastosowaniu może wystąpić tymczasowe pogorszenie ostrości wzroku; w takim wypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn oraz należy zaczekać do powrotu normalnej ostrości wzroku.