

# OPTILETS, lancety, 50 szt.

Cena: 10,32 zł



## Opis słownikowy

|  |                      |
|--|----------------------|
| Producent /<br>Podmiot<br>Odpowiedzialny | DIAGNOSIS S.A.       |
| Przechowywanie                           | Temperatura pokojowa |
| Rejestracja                              | Wyrób medyczny       |

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

Sterylna, jednorazowa lanceta Optilets dedykowana do nakłuwacza Optilet mini. Wyjątkowo cienkie i ostre ostrze zapewnia możliwie najmniej bolesne nakłucie oraz łatwe pobranie próbki krwi.

### Do użytku z nakłuwaczem OPTILET MINI

#### Instrukcja użycia

1. Umyj ręce ciepłą wodą z mydłem i dobrze je osusz
2. Umieść lancet w nośniku nakłuwacza
3. Usuń nasadkę zabezpieczającą
4. Wybierz miejsce nakłucia
5. Wykonaj nakłucie
6. Wykonaj pomiar poziomu glukozy zgodnie z instrukcją, oczyść miejsce nakłucia
7. Załóż nasadkę zabezpieczającą i wyrzuć lancet do odpowiedniego pojemnika

### **Dlaczego należy wymieniać lancety?**

Wymiana lancetu:

- minimalizuje ryzyko zakażenia;
- pozwala na łatwiejsze pobranie próbki krwi;
- zmniejsza odczucie bólu.

Lancety są jednorazowego, osobistego użytku. Nie należy używać ich ponownie.

Użycie tego samego lancetu przez osoby trzecie wiąże się z podwyższonym ryzykiem zakażenia mikrobiologicznego.

Nie używać lancetu jeśli nasadka jest uszkodzona. Nie przechowywać lancetu w nakłuwaczu.