

## PANI TERESA Opaska elastyczna stawu kolanowego L, 1 szt.



Cena: 22,27 zł

### Opis słownikowy

Postać	Opaska
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SIGVARIS S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

### Opis produktu

## OPASKA elastyczna stawu kolanowego -/rozmiar L/

### Opis

Opaska rehabilitacyjna kolana stabilizuje ten staw i na jakiś czas wspomaga proces odbudowania pełnej sprawności. Stosuje się ją do leczenia stawów, na zalecenie ortopedy. Jest zrobiona z uciskowego elastycznego materiału. Rehabilitacyjne opaski stabilizujące na kolano stosuje się przy zwyrodnieniach stawu kolanowego, po zdjęciu opatrunku gipsowego – dla wzmocnienia kolana, w przypadku zwichnięć lub obrażeń kolana.

### Działanie

W przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo-reumatycznych stawu kolanowego;  
po zdjęciu opatrunków gipsowych – wzmocnia i stabilizuje kolano;

przed operacjami i po operacjach uszkodzonych łąkotek;  
w przypadkach zwichnięć lub obrażeń kolana;  
zapobiega obrzękom, łagodzi bóle;  
wspomaga aparat więzadłowy stawu przy wysiłku fizycznym.

### **Sposób użycia**

Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość stawu kolanowego.

### **Przeciwwskazania**

Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

### **Ostrzeżenia**

Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.

W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PANI TERESA

Pozwolenie: CE