

# Pani Teresa Opaska elastyczna stawu skokowego taśma S, 1 szt.



Cena: 21,09 zł

## Opis słownikowy

Postać	Opaska
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SIGVARIS S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

## Opis produktu

### OPASKA elastyczna stawu skokowego S

#### Opis

Opaska elastyczna stawu skokowego marki Pani Teresa to wyrób medyczny, polecany wspomagająco przy procesach leczenia i rehabilitacji zgodnie ze wskazaniami lekarza lub fizjoterapeuty. Produkt jest prosty w obsłudze. Dopasowuje się do kształtu stopy i może być noszony razem z obuwem.

Występuje w rozmiarach S-XL

Rozmiar (cm) Obwód nogi nad kostką

S 19-22

M 23-25

L 26-28

XL >28

## Skład

Poliamid 47%, Poliester 34%, Latex 19%.

## Zawartość opakowania

Opaska elastyczna stawu skokowego w kolorze beżowym, 1 sztuka.

## Wskazania

Produkt wskazany do stosowania profilaktycznie i pourazowo. Pomaga łagodzić ból i zmniejszać obrzęki, które są wynikiem kontuzji. Wzmacnia aparat więzadłowy stawu skokowego chroniąc go przed częstymi skręcieniami stawu. Wyrób doskonale zabezpiecza staw po urazach. Może być stosowany w przypadku schorzeń reumatyczno-zwyrodnieniowych, a także jako opatrunek po zdjęciu gipsu.

## Sposób użycia wyrobu medycznego

### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kostką, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

### Sposób zakładania:

Opaskę nałożyć na staw skokowy krzyżując taśmę na przegubie. Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

## Uwagi

Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem. W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

## Przeciwwskazania

Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

## Ostrzeżenia

Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.

W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PANI TERESA

Pozwolenie: CE