

PANI TERESA Opaska elastyczna stawu kolanowego bezszwowa M, 1 szt.



Cena: 30,47 zł

Opis słownikowy

Postać	Opaska
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SIGVARIS S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki higieniczne

Opis produktu

OPASKA elastyczna stawu kolanowego cielista (M)

Opis

Opaska elastyczna stawu kolanowego to wyrób medyczny przeznaczony do celów wspomagania procesu leczenia oraz rehabilitacji zgodnie ze wskazaniami. Wyrób cechuje się anatomicznym kształtem i jest przyjazny dla skóry. Produkt jest bezszwowy. Może być stosowany wielokrotnie.

Rozmiar: M
Kolor: Beżowy.

Skład

Poliamid 60%, elastan 38%, silikon 2%.

Wskazania

Produkt przeznaczony do stosowania: profilaktycznie, po urazach, przeciwbólowo, w przewlekłych zmianach natury reumatycznej-zwyrodnieniowej.

Uwagi

Tabela rozmiarów:
Rozmiar (cm) S M L XL
Obwód nogi pod kolanem 30-38 39-47 48-54 55-63

Sposób użycia

Założyć wyrób wciągając go na wysokość stawu kolanowego.

Środki ostrożności

Opaska stawu kolanowego powinna być stosowana tylko na nienaruszoną skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.

Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania.

W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Właściwe użycie wyrobu może wymagać porady specjalistycznego personelu medycznego.

Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta.

Dobranie odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem właściwego funkcjonowania wyrobu.

Każde użycie wyrobu powinno być poprzedzone sprawdzeniem pod kątem oznak zużycia lub starzenia. Jedynie nieuszkodzony wyrób daje gwarancję optymalnego działania.

Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej.

Pielęgnacja i przechowywanie

Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu. Chronić przed działaniem wysokich temperatur i bezpośrednim nasłonecznieniem

Zaleca się wypranie wyrobu przed pierwszym użyciem.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PANI TERESA