

Pani Teresa Pas brzuszny 30 M, 1 szt.



Cena: 49,18 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SIGVARIS S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

Opis produktu

PAS BRZUSZNY uniwersalny "30" r.M

Opis

Uniwersalny pas brzuszny, w rozmiarze M (Wysokość wyrobu 30 cm, dobry na obwód brzucha 91 – 101 cm) polecany dla osób po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej. Pas znacząco ułatwia poruszanie się i codzienne funkcjonowanie osoby po operacji, zmniejsza ryzyko wystąpienia przepuklin pooperacyjnych, a także poprawia komfort psychiczny użytkownika. Pas zapinany jest na rzep.

Działanie

- po operacjach jamy brzusznej – pas ułatwia poruszanie się
- zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej
- ogranicza powiększanie się istniejących przepuklin brzusznych, np. pępkowych, pooperacyjnych
- wspomaga leczenie w przypadku rwy kulszowej
- w przebiegu chorób zwyrodnieniowo-zapalnych stawów pas ma działanie ochraniające i łagodzi bóle

- wzmacnia mięśnie brzucha i zapobiega opuszczaniu trzewi jamy brzusznej
- ma działanie ocieplające

Sposób użycia

Odpiąć rzep. Pas ułożyć obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo – krzyżowy, tak by zapięcie na rzep przypadało z przodu. Pas zapiąć regulując indywidualnie w obrębie zapięcia.

Uwaga! Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

Przeciwwskazania

Nie stosować wyrobu na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.

Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PANI TERESA

Pozwolenie: CE