

## Pani Teresa Pas poporodowy biały M, 1 szt.



Cena: 41,02 zł

### Opis słownikowy

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Producent / Podmiot Odpowiedzialny | SIGVARIS S.A.                    |
| Przechowywanie                     | Temperatura pokojowa             |
| Rejestracja                        | Środki zaopatrzenia technicznego |

### Opis produktu

#### PAS BRZUSZNY poporodowy r.M

##### Opis produktu

Brzuszny pas poporodowy Pani Teresa to wyrób medyczny wielokrotnego użytku stworzony z myślą o kobietach po porodzie. Może być stosowany zarówno po porodzie fizjologicznym, jak i operacyjnym (cesarskim cięciu) w celu wsparcia regeneracji nadmiernie rozciągniętych w okresie ciąży powłok brzusznych. Co więcej, stosowanie pasa po cesarskim cięciu ogranicza ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej oraz łagodzi bóle rany pooperacyjnej, pomaga odzyskać młodej mamie poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Pas umożliwia również wczesne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych, prowadzących do wzmocnienia mięśni brzucha - regularne noszenie pasa i wykonywanie odpowiednich ćwiczeń gimnastycznych skraca czas uzyskania sylwetki sprzed ciąży.

Pas ma 24 cm szerokości i przewiewną strukturę. Zakłada się go przez nogi. Aby prawidłowo dopasować rozmiar, należy zmierzyć obwód brzucha.

##### Zastosowanie

- Po porodzie fizjologicznym oraz po cesarskim cięciu jako wsparcie regeneracji rozciągniętych podczas ciąży powłok brzucha.
- Po porodzie operacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przepukliny pooperacyjnej i ryzyka rozejścia kresy białej, do ochrony rany pooperacyjnej i złagodzenia dolegliwości bólowych.

##### Sposób użycia

Pas należy wciągnąć przez nogi na wysokość brzucha i talii.

##### Składniki

Poliamid 46%, polipropylen 18%, lateks 18%, bawełna 9%, poliester 9%.

## Cechy produktu

- rozmiar M jest odpowiedni dla kobiet, których obwód brzucha wynosi 91-100 cm,
- szerokość: 24 cm,
- kolor: biały,
- wielokrotnego użytku,
- wciągany przez nogi,
- wzmacnia nadmiernie rozciągnięte powłoki brzuszne po porodzie,
- zapobiega wystąpieniu przepukliny pooperacyjnej,
- łagodzi bóle rany pooperacyjnej,
- daje uczucie pewności i bezpieczeństwa,
- ułatwia wczesne wykonywane ćwiczeń gimnastycznych wzmacniających mięśnie brzucha.

## Ważne wskazówki

- Stosowanie wyrobu należy omówić z lekarzem ginekologiem-położnikiem.
- W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.
- Prać ręcznie w wodzie o temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny.
- Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować ani nie chlorować.
- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu, chronić przed działaniem wysokich temperatur.

## Ostrzeżenia

Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha - w czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Dodatkowe informacje

Nastąpiła zmiana szaty graficznej opakowania. Produkt w starej wersji wydawany będzie do wyczerpania zapasów.

Zawartość opakowania

1 sztuka

## Obsługa pasa poporodowego brzuszego

Poporodowy pas brzuszny Pani Teresa charakteryzuje się zamkniętą konstrukcją, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do sylwetki. Wysokość pasa wynosząca 24 cm sprawia, że doskonale podtrzymuje powłoki brzuszne, rozciągnięte na skutek ciąży i porodu.

Poporodowy pas brzuszny Pani Teresa

## DOPASOWANIE PRODUKTU - INFORMACJE:

Rozmiar Obwód pasa

S 80-90 cm

M 91-100 cm

L 101-110 cm

XL 111-120 cm

XXL 121-140 cm

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PANI TERESA