

# Pani Teresa Pas przepukli/pelota lewy S, 1 szt.

Cena: 49,99 zł



## Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SIGVARIS S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

## Opis produktu

### PAS NA PRZEPUKLINĘ PACHWINOWĄ

Jednostronny pas pachwinowy z pelotą – prawostronny lub lewostronny Pani Teresa Medica PT 0109 to wyrób medyczny wielokrotnego użytku. Idealny przy wspomaganiu procesu leczenia i rehabilitacji przy braku możliwości operacji niewielkiej przepukliny pachwinowej oraz profilaktyczne przeciw nawrotom w przypadku słabego aparatu mięśniowo-więzadłowego w opcji prawostronne lub lewostronne. Wygodne zapięcie, komfort w użytkowaniu. Łagodny dla skóry. Dostępny w kolorze beżowym i rozmiarach od S- XXL.

### WSKAZANIA:

- pacjenci z niewielką przepukliną pachwinową, którzy z różnych przyczyn nie mogą być operowani
- po operacji przepukliny pachwinowej w przypadku słabego aparatu mięśniowo-więzadłowego jako profilaktyka nawrotów

### PRZECIWSKAZANIA:

Nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej lub uwięźniętej, ponieważ może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia ściany jelita i opóźnić konieczność pilnego leczenia operacyjnego.

### SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

Odpiąć rzepy. Taśmę główną zapiąć na wysokości bioder. Do taśmy głównej przypiąć taśmę kroczną – najpierw z przodu (w przypadku pasa PT 0109 szersza część taśmy przypada z przodu), dociskając odpowiednio odprowadzoną przepuklinę pachwinową, a następnie, prowadząc wzdłuż wewnętrznej części uda, zapiąć taśmę z tyłu.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Jednostronny pas pachwinowy należy stosować tylko na nienaruszoną skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania.
- W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Właściwe użycie wyrobu może wymagać porady specjalistycznego personelu medycznego.
- Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta.
- Dobranie odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem właściwego funkcjonowania wyrobu.
- Każde użycie wyrobu powinno być poprzedzone sprawdzeniem pod kątem oznak zużycia lub starzenia. Jedynie nieuszkodzony wyrób daje gwarancję optymalnego działania.
- Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej.

#### PIELĘGNACJA I PRZECHOWYWANIE:

- Pas przepuklinowy pachwinowy należy przechowywać w suchym pomieszczeniu. Chronić przed działaniem wysokich temperatur i bezpośrednim nasłonecznieniem
- Zaleca się wypranie wyrobu przed pierwszym użyciem.
- Przed praniem zapiąć rzepy w celu uniknięcia zahaczenia wyrobu

#### Skład:

- Elastil 35%
- Poliamid 28%
- Poliester 19%
- Lateks 8%
- Elastan 5%
- Polietylen 5%

PAS NA PRZEPUKLINĘ JEDNOSTRONNY LEWA (S) PT 0109