

## PANI TERESA Temblak M, 1 szt.



Cena: 45,12 zł

### Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SIGVARIS S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

### Opis produktu

#### Temblak PANI TERESA L - 1 szt.

Pani Teresa Medica Temblak Kończyny Górnej L

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- jako opatrunek podtrzymujący opatrunek gipsowy
- po zdjęciu opatrunku gipsowego – podczas rehabilitacji
- jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego

#### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

#### Sposób zakładania:

Przedramię umieścić w kieszeni temblaka, kciuk zawiesić w przeznaczonym do tego „oczku” w wewnętrznej części temblaka. Taśmę przełożyć przez zdrowe ramię dopasowując odpowiednio jej długość za pomocą rzepów, a wzmocnienie ochronne na taśmie układając na szyi.

#### Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

#### Przepis prania:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

#### Skład

Poliester 85%, polipropylen 8%, bawełna 4%, poliamid 3%.

**Uwagi**

Tabela rozmiarów;

Rozmiar ramienia (cm) XXS XS S M L XL

Długość przedramienia 15-16 17-20 21-24 25-30 31-34 35-37