

PANI TERESA Temblak siatkowy M, 1 szt.



Cena: 45,12 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SIGVARIS S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

Opis produktu

Temblak PANI TERESA L - 1 szt.

Opis

Temblak siatkowy na rękę marki Pani Teresa to wyrób medyczny, którego używa się w celu wspomagania procesu leczenia i rehabilitacji zgodnie ze wskazaniami lekarza lub fizjoterapeuty. Produkt został wykonany z przewiewnego materiału. Dzięki miękkim osłonom umieszczonym na pasie, nie ociera skóry wokół szyi i karku. Szeroki zakres regulacji pozwala dopasować temblak do naturalnej postawy ciała.

Rozmiar: L

Skład

Poliester 85%, Polipropylen 10%, Poliamid 5%.

Zawartość opakowania

Temblak siatkowy na rękę w kolorze czarnym, 1 sztuka.

Wskazania

Produkt wskazany do stosowania po urazach i po operacjach. Znajdzie zastosowanie w czasie procesu rehabilitacyjnego. Wyrób działa odciążająco w trakcie noszenia opatrunku gipsowego.

Działanie

- pourazowo
- pooperacyjnie
- odciążająco, w celu podtrzymania opatrunku gipsowego
- w czasie procesu rehabilitacyjnego

Sposób użycia:

Umieścić przedramię w kieszeni temblaka. Zawiesić kciuk w przeznaczonym do tego „oczku” (opcjonalnie). Przełożyć taśmę podtrzymującą kieszeń przez zdrowe ramie, dopasowując odpowiednio jej długość za pomocą zapięcia na rzepy. Ułożyć osłonę w okolicy szyi.

Dodatkowe

Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania: Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi: Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.