

Paso Gaza bawełniana jałowa 0.5m 13N, 1 szt.

Cena: 1,68 zł



Opis słownikowy

Postać	Środek higieniczny
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

- Gaza jałowa produkowana ze 100% bawełnianej gazy 13-nitkowej spełniającej najwyższe standardy jakości, zgodne z Europejską Normą EN 14079;
- Znajduje szerokie zastosowanie w lecznictwie;
- Przeznaczona głównie do opatrywania ran, w celu absorpcji wysięków powstałych podczas zabiegów chirurgicznych oraz w wyniku urazów.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny do jednorazowego użytku, przeznaczony do bezpośredniego opatrywania uszkodzonej skóry, w celu absorpcji wysięków, powstałych podczas zabiegów chirurgicznych oraz w wyniku urazów.

Środki ostrożności:

Przed użyciem sprawdzić stan opakowania – nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Stosować niezwłocznie po otwarciu opakowania. Podczas procedur inwazyjnych wyrób stosować w stanie nierozwiniętym. Wyrób do użytku jednorazowego – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem! Nie sterylizować повторно. Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia. Po przezięknięciu opatrunku wymienić wyrób na nowy. Stosować nie dłużej niż 24 godziny od chwili założenia lub postępować według zaleceń lekarza. Używać do czasu zagojenia rany.

Przeciwwskazania:

Nie zidentyfikowano przeciwwskazań.

Dostępne modele:

13-nitkowa: ½ m2;

Zawartość: 1 szt.

Podmiot odpowiedzialny:

Paso Trading
Adres 95-200 Pabianice
ul. Lutomska 48

Kontakt tel./fax: 42 215 32 50