

Pasocare Med Paski jałowe do zamykania ran (3x75mm + 6,4x80mm), 8 szt. (5 + 3)

Cena: 6,33 zł



Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

- Hipoalergiczne, nie powodują uczuleń;
- Jałowe;
- Samoprzylepne;
- Łatwe w użyciu;
- Służą do zbliżania krawędzi ran do siebie oraz do zapobiegania otwieraniu się ran podczas ich naturalnego procesu gojenia;
- Wykonane z miękkiej włókniny, delikatne dla skóry, oddechające.

Włókninowe paski samoprzylepne służą do zbliżania do siebie krawędzi uszkodzonej skóry, dzięki czemu zapobiegają otwieraniu się ran i wspierają ich naturalny proces gojenia.

Skład zestawu:

8 plastrów, zapakowanych w 2 listki:

- 5 sztuk w rozmiarze 3 x 75 (mm x mm)
- 3 sztuki w rozmiarze 6,4 x 80 (mm x mm)

Zastosowanie

Włókninowe paski samoprzylepne służą do zbliżania do siebie krawędzi uszkodzonej skóry, dzięki czemu zapobiegają otwieraniu się ran i wspierają ich naturalny proces gojenia.

Instrukcja używania

1. Oczyszczyć i zdezynfekować ranę, a następnie delikatnie ją osuszyć.
2. Otworzyć lister z plastrami w danym rozmiarze. Zagnij listek wzdłuż perforacji i pociągnij w celu odklejenia pasków.
3. Zaaplikuj plaster zbliżając do siebie krawędzie zranionej skóry, uważając przy tym, aby zbyt mocno jej nie naprężyć.
4. Jeśli to konieczne zastosuj kilka pasków w odległości nieprzekraczającej 1 cm od siebie.

Środki ostrożności:

Nie stosuj, jeśli opakowanie bezpośrednio wyrobu jest uszkodzone,
Po otwarciu opakowania bezpośrednio użyj plastry niezwłocznie,
Wyrób jednorazowego użycia, nie stosuj ponownie,
W przypadku zakażeń lub stanów zapalnych skóry, przed zastosowaniem wyrobu skonsultuj się z lekarzem,
Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.

Zawartość: 8 szt.

Podmiot odpowiedzialny:

Paso Trading
Adres 95-200 Pabianice
ul. Lutomska 48
Kontakt tel./fax: 42 215 32 50