

Pasocare MED plaster opatrunkowy jałowy 10 cm x 20 cm, 1 szt.

Cena: 2,00 zł



Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Plaster opatrunkowy jałowy:

- Przeznaczony do absorbowania krwi lub wysięku z rany,
- Chroni ranę przed infekcjami oraz rozprzestrzenianiem się zakażenia,
- Wykonany z włókniny,
- Przeznaczony do jednorazowego użycia,
- Występuje w podanych rozmiarach.

Zastosowanie

Wyrób medyczny jałowy, przeznaczony do użycia jako bariera mechaniczna, do absorbowania niewielkiej ilości krwi lub wysięków z rannych oraz do ochrony rany przed infekcją.

Instrukcja używania

Oczyścić i zdezynfekować ranę. Otworzyć opakowanie i wyjąć plaster. Zdjąć folię ochronną ze strony przylepnej plastra. Zaaplikować plaster tak, aby opatrunek zakrywał w całości uszkodzony obszar skóry. Używać do czasu zagojenia rany, stosując wymianę plastra na nowy po przesiąknięciu opatrunku lub według zaleceń lekarza, jednak nie później niż po upływie 24h od chwili założenia.

Środki ostrożności:

Przed użyciem sprawdzić stan opakowania – nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Stosować niezwłocznie po otwarciu. Wyrób do użytku jednorazowe – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem! Nie sterylizować powtórnie. Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia.

Przeciwwskazania

Nie stosować na rany silnie sączące.

Rozmiar:

10 x 20 (cm x cm).

Podmiot odpowiedzialny:

Paso Trading

Adres 95-200 Pabianice

ul. Lutomierska 48

Kontakt tel./fax: 42 215 32 50