

# Pasocare Wodoodporny Plus plaster zestaw 20x70mm, 10 szt.



Cena: 3,91 zł

## Opis słownikowy

Postać	Środek higieniczny
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

**Opis:**  
Plaster wodoodporny 3D z opatrunkiem to unikalne połączenie perforacji podłoża 3D z nieprzywierającym opatrunkiem.

### Cechy:

- wodoodporny – doskonale zabezpiecza ranę przed zamoczeniem i zanieczyszczeniami,
- hipoalergiczný – nie powoduje uczuleń, delikatny dla skóry,
- elastyczny – idealnie dopasowuje się do kształtu ciała,
- przewiewny – co przyspiesza gojenie ran,
- praktyczny w użyciu – przeznaczony do cięcia nożyczkami,
- dostępny w dwóch rozmiarach: 10 x 6 cm lub 10 x 8 cm,
- idealny do opatrywania ran na łokciach, kolanach.

**Zastosowanie:**  
Opatrywanie drobnych ran i skaleczeń, szczególnie gdy są narażone na zamoczenie. Niejałowe, jednorazowego użyciu.

### Właściwości:

- Przepływ powietrza;
- Unikalna struktura perforacji podłoża 3D;
- Nieprzywierający opatrunek;
- Przepływ powietrza.

## Instrukcja używania

1. Wyjmij plaster z opakowania bezpośredniego.
2. Zaaplikuj plaster na czystą i suchą skórę, kierując opatrunek bezpośrednio na ranę.
3. W celu usunięcia plastra, chwycić za jego krawędź i pociągnąć wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia.
4. Zmieniaj plaster codziennie.

## Środki ostrożności:

Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednie plastra jest uszkodzone,  
Wyrób do użytku jednorazowego – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem,  
Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia.

## Przeciwwskazania

Nie stosować na rany silnie sączące.

Rozmiary:

10 x 6 (cm x cm)

10 x 8 (cm x cm)

Opakowanie jednostkowe:

Zawartość: 10 szt.

## Podmiot odpowiedzialny:

Paso Trading

Adres 95-200 Pabianice

ul. Lutomierska 48

Kontakt tel./fax: 42 215 32 50