

# Pasosleep plastry przeciw chrapaniu rozmiar XL \* 10 sztuk



Cena: 20,98 zł

## Opis słownikowy

Postać	plastry
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	EUROSIREL
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Plastry przeciw chrapaniu swoje przewidziane zastosowanie uzyskują dzięki „mechanicznemu działaniu”, rozszerzają nozdrza ułatwiając oddychanie i tym samym pomagają zmniejszyć chrapanie oraz łagodzą dyskomfort spowodowany przekrwieniem błony śluzowej nosa. Stosować przed snem.

Plastry przeciw chrapaniu dzięki swojemu „mechanicznemu działaniu” rozszerzają nozdrza i ułatwiają oddychanie, tym samym pomagają zmniejszyć chrapanie.

**SKŁAD:** 67 x 20 mm, 10 szt.

### SPOSÓB UŻYCIA:

1. Ostrożnie oczyścić i osuszyć skórę nosa.
2. Wyjmij plaster z opakowania bezpośredniego i odklej część ochronną.
3. Naklej plaster na skórę, w poprzek nosa i przyciskając palcami odczekaj kilka sekund, aż plaster przylegnie mocno do skóry.
4. W celu usunięcia plastra chwyć za jego krawędź i usuwaj powoli wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia. Czynność odklejania najlepiej wykonuj w trakcie mycia twarzy lub biorąc prysznic ciepłą wodą. ŚRODKI

### OSTROŻNOŚCI / przeciwwskazania:

1. Wyrób tylko do użytku jednorazowego, zewnętrznego.
2. Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednie plastra jest uszkodzone.
3. Stosować wyłącznie na oczyszczonej, nieuszkodzonej i niepodrażnionej skórze.
4. Stosować nie dłużej niż 8 godzin.
5. Nie stosować u dzieci poniżej 5 roku życia.
6. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry natychmiast przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.
7. Plaster nie będzie skuteczny w przypadku trudności w oddychaniu związanych z niedrożnością nosa spowodowaną np. infekcją

górnych dróg oddechowych, problemami anatomicznymi, takimi jak skrzywienie przegrody nosowej czy bezdech senny.  
8. Każdy poważny incydent należy zgłosić do producenta i właściwego organu.