

Pelafen MD Zatoki i Nos, spray, 30 ml



Cena: 16,24 zł

Opis słownikowy

Postać	Spray
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

PELAFEN KID ZATOKI I NOS 100ml smak malinowy

Wyrób medyczny Pelafen® MD Zatoki i Nos spray dla dzieci powyżej 2. roku życia stosuje się do profilaktyki oraz wspomagania leczenia objawów stanów zapalnych zatok i nieżytu nosa różnego pochodzenia, w celu ułatwienia mechanicznego usuwania drobnoustrojów z jamy nosowej.

Wyrób Pelafen® MD Zatoki i Nos spray oczyszcza jamę nosową i zatoki z wydzieliny powstającej w przebiegu chorób zapalnych, a także alergii.

Zawarta w wyrobie opatentowana formuła MUCOBIONE™ działa wielokierunkowo i pomaga zredukować ilość drobnoustrojów, ale także innych szkodliwych czynników (jak: alergeny, pyły, cząstki kurzu w jamie nosowej).

Wyrób medyczny Pelafen® MD Zatoki i Nos spray dla dzieci powyżej 2. roku życia stosuje się do profilaktyki oraz wspomagania leczenia objawów stanów zapalnych zatok i nieżytu nosa różnego pochodzenia, w celu ułatwienia mechanicznego usuwania drobnoustrojów z jamy nosowej.

Wyrób Pelafen® MD Zatoki i Nos spray oczyszcza jamę nosową i zatoki z wydzieliny powstającej w przebiegu chorób zapalnych, a także alergii.

Zawarta w wyrobie opatentowana formuła MUCOBIONE™ działa wielokierunkowo i pomaga zredukować ilość drobnoustrojów, ale także innych szkodliwych czynników (jak: alergeny, pyły, cząstki kurzu w jamie nosowej).

Stany zapalne zatok Nieżyt nosa opatentowana formuła MUCOBIONE™

- Zawiera naturalne składniki
- Dla dzieci powyżej 2. roku życia i dorosłych
- Aż 333 dawki

Zastosowanie:

Pelafen® MD ZATOKI I NOS spray wspomaga leczenie:

- infekcji przebiegających z zapaleniem zatok

(ostrzych przewlekłych stanów zapalnych zatok przynosowych)

- infekcji przebiegających z nieżytym nosa (katarem)
- alergicznego nieżytu nosa
- nieżytów nosa różnego pochodzenia np. zanikowego nieżytu nosa, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok, w okresie zwiększonej ekspozycji na pyły

Pelafen® MD ZATOKI I NOS spray:

Opatentowana formuła MUCOBIONE™

(ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej i biały owsa)

Zmienia właściwości fizyczne zalegającego śluzu zwierającego m.in. drobnoustroje, dzięki temu śluz ulega rozrzedzeniu i jest sprawniej usuwany z powierzchni błony śluzowej nosa oraz zatok.

Proces odbywa się na drodze fizycznej, bez ingerencji w metabolizm komórek.

Olejek eukaliptusowy i miętowy

Olejki dają przyjemny aromat oraz uczucie świeżości.

Sposób użycia:

Wyrób medyczny Pelafen® MD ZATOKI I NOS spray należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając wskazówek i zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania.

Dzieci powyżej 2. Do 6. Roku życia	Dzieci w wieku od 7. Do 12. Roku życia	Dzieci powyżej 12. Roku życia i dorośli
Jedna aplikacja do każdego otworu nosowego do 3 razy dziennie	Jedna aplikacja do każdego otworu nosowego do 4 razy dziennie	1 -2 aplikacje do każdego otworu nosowego do 4 razy dziennie

W przypadku utrzymywania się objawów dłużej niż 7 dni lub w przypadku nasilenia w trakcie stosowania preparatu,

należy skonsultować się z lekarzem.

Przed użyciem należy wstrząsnąć.

Przed pierwszym użyciem kilkakrotnie nacisnąć aplikator, aby wypchnąć go płynem. Wyrób do stosowania wyłącznie w jamie nosowej.

Pelafen® MD Zatoki i Nos spray może być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią po konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Dzieci w wieku do lat 10 powinny używać wyrobu pod nadzorem osoby dorosłej.
Wyrób zawiera biały proszek owsa, w tym gluten. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzęść stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temp. 5°C – 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Phytopharm Kielce S.A., Kielce 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, tel. +48 61 28 68 000, fax. +48 61 28 68 529