

PIELUCHY ANATOMICZNE SAN SENI MAXI *30szt.



Cena: 55,90 zł

Opis słownikowy

Postać	Pieluchomajtki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	TZMO-SA
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

PIELUCHY ANATOMICZNE SAN SENI MAXI *30szt.

Seni San Maxi to oddychające pieluchy anatomiczne mocowane za pomocą majtek siatkowych. Polecane są w szczególności osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, otyłym oraz trwale unieruchomionym.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Płeć:

- kobieta
- mężczyzna

Stan fizyczny:

- osoba aktywna, samodzielna
- osoba leżąca, wymagająca opieki

Rodzaj inkontynencji:

- inkontynencja moczowa
- inkontynencja kałowa

Stopień inkontynencji i poziom chłonności:

- inkontynencja: ciężka
- chłonność: 7/9

San Seni Maxi to oddychające pieluchy anatomiczne do użytku razem z majtkami siatkowymi. Przeznaczone są dla osób mobilnych i niemobilnych z ciężkim nietrzymaniem moczu. Zapewniają wysokie poczucie suchości. Gwarantują wygodę i duży komfort użytkowania.

San Seni Maxi to oddychające pieluchy anatomiczne mocowane za pomocą majtek siatkowych. Polecane są w szczególności osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, otępym oraz trwale unieruchomionym.

Dla kobiet i mężczyzn aktywnych, samodzielnych oraz leżących i wymagających opieki z inkontynencją moczową i kałową ciężką.

Zwiększone poczucie suchości - specjalna włóknina rozprowadzająca EDS (Extra Dry System) znajdująca się we wkładzie chłonnym umożliwia szybsze i dokładniejsze rozprowadzanie wilgoci wewnątrz wkładu, zapewniając tym samym komfortowe poczucie suchości.

Zapobieganie przeciekaniu – osłonki boczne wykonane ze specjalnej hydrofobowej włókniny zapobiegają przeciekaniu wilgoci na zewnątrz pieluchy. Po jej założeniu osłonki idealnie dopasowują się do ciała.

Zapobieganie powstawaniu odparzeń i podrażnień – specjalna struktura warstwy zewnętrznej pieluchy umożliwia przepływ powietrza, przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu cieczy, dzięki czemu skóra może swobodnie oddychać. Oddychalność wyrobu sprawia, że powstaje mniej odparzeń i podrażnień, zmniejsza się również ryzyko powstania odleżyn.

Informacja o konieczności zmiany pieluchy - indykator wilgotności w formie nadruku lub kolorowych pasków informuje o napełnieniu pieluchy. Indykator zmienia się w kontakcie z wilgocią – nadruk rozmywa się, a w przypadku pasków zmienia się ich kolor na niebiesko-zielony. Rozmycie nadruku lub zmiana koloru indykatora na 50-80% jego długości informuje o konieczności zmiany pieluchy.

Zapobieganie powstawaniu nieprzyjemnego zapachu - superabsorbent użyty w pieluchach, obok silnych właściwości chłonnych, ma również właściwości antibakteryjne, dzięki czemu redukuje rozwój bakterii odpowiadających za powstawanie nieprzyjemnego zapachu.

Lepsze dopasowanie do ciała - dzięki anatomicznemu kształtowi pieluchy dopasowują się do ciała zmniejszając tym samym ryzyko otarć mechanicznych.

Zachowanie dyskrecji i wygody – pieluchy idealnie dopasowują się do ciała i są mniej zauważalne przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu chłonności.

Podwyższony komfort użytkownika – wyjątkowo miękka i delikatna włóknina pozwala na zachowanie dużej wygody w trakcie korzystania z pieluch.

Zmniejszone ryzyko powstawania reakcji alergicznych – zamiast lateksu pieluchy San Seni mają elementy z elastycznej przędzy, dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko wystąpienia uczulenia skórniego. Pieluchy San Seni poddane zostały również niezależnym testom dermatologicznym.

Sposób użycia

- Pieluchę przed założeniem należy aktywować. Dzięki temu, stanie się bardziej miękka, a wkład bardziej chłonny.
- Rozłóż pieluchę, chwyć ją za dwa końce i lekko pociągnij.
- Złóż pieluchę wzdłuż na pół i lekko rozciągnij.
- Opuść majtki siatkowe do połowy ud.
- Aktywowaną wcześniej pieluchę anatomiczną włóż między nogi warstwą chłonną do góry.
- Pamiętaj, że szersza część pieluchy to część tylna, a węższa część powinna znaleźć się z przodu.
- Dopasuj pieluchę anatomiczną do ciała, rozprostowując jej przednią i tylną część tak, by dobrze przylegała do ciała. Upewnij się, że pielucha leży dobrze w kroku, a następnie przytrzymując pieluchę naciągnij majtki siatkowe.
- Po założeniu majtek siatkowych popraw pieluchę anatomiczną i upewnij się, że jest dobrze dopasowana do ciała, a jej brzegi nie są podwinięte.
- Zużyta pieluchę zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.

- Stań z brzegu łóżka i zegnij w kolanie jedną z nóg chorego.
- Opuść majtki siatkowe do połowy ud podopiecznego.
- Obróć chorego na bok i po dokonaniu czynności pielęgnacyjnych aktywowaną wcześniej pieluchę anatomiczną włóż między jego nogi. Rozłóż tylną część pieluchy anatomicznej tak, by dobrze przylegała do ciała, a indykator wilgotności znajdował się na przedłużeniu linii kręgosłupa.
- Podciągnij majtki siatkowe z tyłu ku górze. Wyciągnij przednią część pieluchy anatomicznej i dopasuj ją do krocza.
- Obróć chorego na plecy i nieznacznie unosząc go z lewej i prawej strony podciągnij majtki siatkowe do góry.
- Zużyta pieluchę zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Jeżeli nie podano inaczej, środki farmaceutyczne należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, tj. od 15 do 25 st.C.