

Plaster na odciski z kwasem salicylowym Komfort, 4 szt.

Cena: 9,52 zł



Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	LANGSTEINER SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Wskazania:

Langsteiner Plastry na odciski z kwasem salicylowym Komfort to wyrób medyczny wskazany do stosowania w celu wspomagania leczenia nagniotków.

Właściwości:

Plastry na odciski z kwasem salicylowym, który zapewniają szybkie i bezbolesne usunięcie nagniotka.

- Do stosowania miejscowego.
- Zawierają kwas salicylowy.
- Chronią przed otarciami.
- Pomagają w usuwaniu odcisków.
- Przynoszą natychmiastową ulgę.

Stosowanie:

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Plastry należy aplikować na czystą i suchą skórę stóp w taki sposób by otwór z substancją czynną przylegał do powierzchni odcisku.

Plastry należy aplikować do momentu całkowitego usunięcia odcisku. Zmiana plastra następuje co 24 godziny.

Po zakończeniu procesu terapeutycznego należy usunąć środkową część odcisku w ciepłej kąpieli stóp z solą i mydłem.

W przypadku pojawienia się zaczerwienienia i podrażnienia należy wstrzymać się z aplikacją kolejnych plastrów.

Ważne informacje:

Wyłącznie do użytku zewnętrznego, do leczenia odcisków. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Nie stosować w

przypadku zaczerwienienia, objawów zapalenia lub zranienia skóry. Jeśli wystąpi uczulenie lub podrażnienie natychmiast przerwać leczenie. Pacjenci z cukrzycą i/lub problemami z krążeniem krwi, kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz dzieci do 16 roku życia przed zastosowaniem plastrów powinni skonsultować się z lekarzem. Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu, w suchym, czystym i chłodnym miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie:
4 sztuki

Producent

LANGSTEINER SP. Z O.O.
ul. Białoprądnicka 16,
31-221 Kraków