

## Plaster SALVEQUICK Blister prevention (pięty, palce), 10 szt.

Cena: 15,47 zł



### Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ORKLA CARE S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

#### Opis produktu

Salvequick plastry na pęcherze i otarcia są wykonane z nowoczesnego hydrokoloidalnego materiału. Tworzą ochronną poduszeczkę, która zabezpiecza pęcherze i otarcia przed naciskiem i tarcieniem, przynosząc natychmiastową ulgę. Są oddychające, pochłaniają nadmiar wilgoci z rany, a jednocześnie tworzą wilgotne środowisko, które wpływa pozytywnie na proces gojenia. Skutecznie chronią przed zanieczyszczeniami, wodą i bakteriami. Plastry Salvequick Blister Plaster Foot Care mogą być stosowane profilaktycznie.

#### Salvequick plastry na pęcherze i otarcia - właściwości:

- łatwe w użyciu,
- oddychające,
- elastyczne,
- niwelują ból,
- chronią przed uciskiem i tarcieniem,
- pochłaniają nadmiar wilgoci,
- przyspieszają gojenie,
- dyskretne (w kolorze cielestym).

#### Zastosowanie

- Plastry na pęcherze i otarcia stóp.
- Do stosowania na pięty i palce.

#### Sposób użycia

Jak stosować Salvequick plastry na pęcherze i otarcia?

- Skóra powinna być całkowicie czysta, sucha i wolna od emulsji, balsamów.
- Usuń papier ochronny z plastra.
- Oderwij połowę folii wzdłuż perforacji.
- Usuń plaster z folii i przyłóż pośrodku pęcherza.
- Pozostaw plaster do czasu, aż sam się odklei.
- Aby łatwo usunąć plaster, pociągnij go z jednej strony i rozciągnij ostrożnie równoległe do skóry.

#### Ważne wskazówki

- Nie aplikuj na pęcherze wypełnione krwią, pęcherze głębokie, silnie krwawiące lub zakażone.
- Osoby z zaburzeniami gojenia się ran, np. diabetycy oraz osoby starsze, powinny regularnie sprawdzać stan gojącego się pęcherza.
- Wyrób medyczny jednorazowego użytku. Nie stosuj ponownie zużytego plastra. Ponowne użycie produktu zwiększa ryzyko infekcji.

#### Zawartość opakowania

Plastry Salvequick Foot Care 10 sztuk mix na pięty i palce.

#### Producent

ORKLA CARE S.A.  
ul. Polna 21  
05-250 Radzymin