

# Plaster SALVEQUICK Blister Rescue PIĘTY (pęcherze), 5 szt.

Cena: 11,72 zł



## Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ORKLA CARE S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis

Wyrób medyczny Salvequick Med Blister Rescue to innowacyjne hydrożelowe plastry zapewniające 360° ochronę pęcherzy pięt. Hydrożelowy opatrunek nie przykleja się do pęcherza, łatwy w usunięciu.

### Działanie

Salvequick Med Blister Rescue chroni powierzchnię skóry w miejscu powstania pęcherza i przynosi ulgę w ucisku. Dzięki silnej adhezji plaster utrzymuje się na miejscu. Produkt łatwy do usunięcia bez naruszania rany.

### Sposób użycia wyrobu medycznego

Należy dokładnie oczyścić ranę i zabezpieczyć ją używając w tym celu odpowiedniego plastra. Należy codziennie oczyszczać ranę oraz zmieniać plastry.

### Stosowanie produktu

Plaster najlepiej umieścić na widocznej poduszce pęcherza w momencie, gdy skóra jest jeszcze nienaderwana.

## Przeciwwskazania i środki ostrożności

- Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
- Chronić przed wilgocią.
- Produkt jednorazowego użytku.
- Tylko do użytku zewnętrznego.