

# Plaster SALVEQUICK Finger Mix, 18 szt.

Cena: 6,56 zł



## Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ORKLA CARE S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis

Dłonie są jedną z części ciała najbardziej narażonych na skaleczenia i otarcia. Jednocześnie, ze względu na dużą ruchomość, rany na rękach i palcach są dość trudne do opatrzenia. Salvequick Finger Mix to zestaw plastrów dostosowanych kształtem i rozmiarem do opatrywania skaleczeń na dłoniach.

### Działanie

- odporne na wodę i brud;
- pozwalają skórze oddychać;
- warstwa wierzchnia wykonana z unikalnego mikroperforowanego materiału, zapewniającego wyjątkową przewiewność opatrunku;
- wysokochłonny opatrunek;
- elastyczne;
- dyskretne (plaster w kolorze skóry);
- dobrze przylegające do skóry, nie przesuwające się.

### Instrukcja stosowania:

1. Skóra powinna być całkowicie czysta i sucha.
2. Usuń zadrukowany papier ochronny.
3. Oddziel jedną połowę papieru ochronnego wzdłuż perforowanej linii.
4. Usuń ochronny papier z plastra i przyklej na środek rany.
5. Trzymaj plaster do momentu, aż zacznie naturalnie odpadać. Uchwyć jeden koniec i pociągnij ostrożnie wzdłuż skóry usuwając plaster.

#### **Przeciwwskazania**

Nie stosuj na zakażone rany.

Chorzy na cukrzycę powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem plastra.

Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

Plaster może być używany tylko przez 1 osobę.

Ponowne użycie produktu zwiększa ryzyko zakażenia.