

Proctanal Enema wlewka doodbytnicza, 120ml

Cena: 12,01 zł



Opis słownikowy

Postać	Wlewka
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	New.Fa.Dem. S.r
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Leczenie zaparć, zwłaszcza gdy występują w postaci uporczywej i powodują znaczny dyskomfort i złe samopoczucie u pacjenta. Przygotowanie do badań radiologicznych i endoskopowych końcowego odcinka jelita, przed i pooperacyjne oczyszczanie jelit.

Stosowany jest w celu oczyszczenia jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi jelita grubego, przed zabiegami chirurgicznymi i porodem, w zaparciach oraz w celu oczyszczenia jelita ze złogów środka kontrastowego po badaniu radiologicznym.

Działanie

Przesuwa masę kałową, ułatwia wypróżnianie.

Jak stosować Proctanal Enema wlewka doodbytnicza 120ml

Opakowanie składa się z jednej butelki i jednego aplikatora. Wlewka doodbytnicza Proctanal Enema może być stosowana w temperaturze pokojowej. W przypadku preferowania stosowania ciepłych wlewek, wystarczy umieścić wlewkę w ciepłej wodzie (poprzez zanurzenie lub w strumieniu wody pod kranem) W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy położyć się na lewym boku. Należy usunąć opaskę ochronną z aplikatora doodbytniczego, ściągnąć osłonkę z butelki i nałożyć aplikator. Chwycić butelkę, delikatnie wsunąć aplikator do odbytu i powoli wycisnąć całą zawartość butelki. Po zakończeniu aplikacji, należy pozostać w pozycji leżącej do momentu poczucia silnej potrzeby wypróżnienia, która zazwyczaj następuje w ciągu 5 minut Dorośli i młodzież (12-18 lat): 1 lewatywa ze 120 ml. Należy stosować jedną lewatywę dziennie.

Dawkowanie

Należy stosować jedną lewatywę dziennie w razie potrzeby lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Uwagi i środki ostrożności

Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od Źródeł ciepła i światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Dodatkowe informacje

Produkt ma wdrożony certyfikat CE. Zgodność UE. Etykieta informacyjna / instrukcja obsługi znajduje się w opakowaniu wyrobu medycznego i jest wydana w języku polskim. Informacje zawarte na opakowaniu są w języku polskim. Wyrób medyczny.

Skład

Sodudiwodofosforna dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sól sodowa p-oksybenzoesanu metylu, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Nie stosować do długotrwałego leczenia.