

Protefix krem mocujący Ekstra hypoalergiczny, 47 g

Cena: 16,32 zł



Opis słownikowy

Postać	Krem
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Cechy:

- nie zawiera konserwantów, barwników ani substancji aromatycznych;
- zmniejsza ryzyko reakcji alergicznej;
- zachowuje wszystkie właściwości mocujące oryginalnego kremu Protefix.

Informacje o produkcie:

Protefix Krem mocujący hypoalergiczny nie zawiera konserwantów, barwników ani substancji aromatycznych. Mogą go więc stosować osoby szczególnie podatne na reakcje uczuleniowe ponieważ zmniejsza ryzyko reakcji alergicznej. Jednocześnie zachowuje wszystkie właściwości mocujące oryginalnego kremu Protefix.

Sposób użycia:

- Krem mocujący nałożyć na oczyszczoną, wilgotną lub suchą protezę.
- Nakładać małą ilość kremu (krótkimi odcinkami), w odstępach. Potrzeba kilku prób, aby ustalić jaka ilość kremu jest konieczna, a jednocześnie nie wypływa spod protezy.
- Protezę założyć, przycisnąć, a następnie lekko przygryźć. Krem działa natychmiast po zastosowaniu.
- Po otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu. Należy usunąć nadmiar oleju poprzez wyciśnięcie go z tubki; nie wpływa to na siłę mocującą kleju.
- Po użyciu należy starannie zamknąć tubę, uważając by nie dostała się do niej woda. Wilgoć po dostaniu się do tuby może spowodować stwardnienie kremu mocującego.

Składniki / Ingredients:

Mieszanka soli Na i Ca kopolimeru eteru metylowinylowego i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu.

Podmiot odpowiedzialny:

Queisser Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa