

Protefix krem mocujący Ekstra mocny XXL, 94 g

Cena: 24,29 zł

Opis słownikowy

Postać	Krem
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny



Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Cechy:

- Silniejsze działanie,
- Szybki efekt,
- Uszczelnienie,
- Ochrona przed uciskiem,
- Długotrwały komfort,
- pojemność: 94g.

Wskazówki ogólne:

- Krem mocujący nie jest w stanie zastąpić dobrego dopasowania protezy przez lekarza stomatologa lub protetyka. Jeśli stwierdzą Państwo, że krem działa słabiej niż zwykle lub czują jego wyciek w trakcie stosowania – należy skonsultować się ze swoim lekarzem. Mogą to być objawy złego dopasowania protezy.
- Przy ponawiających się stanach zapalnych lub uszkodzeniach błony śluzowej – przed zastosowaniem kremu skonsultować się z dentystą.
- Używanie protezy wymaga regularnej higieny jamy ustnej i samej protezy. W tym celu polecamy czyszczenie protezy Pastą czyszczącą Protefix® HIGIENA. Raz w tygodniu protezę należy zdezynfekować przy pomocy Tabletek czyszczących Protefix® HIGIENA.
- Zwykle proteza daje się łatwo wyjąć w celu oczyszczenia; w razie potrzeby należy starannie przepłukać jamę ustną ciepłą wodą a następnie obluźować protezę.
- Długość efektu mocującego zależy od wielu czynników, w tym spożywanych pokarmów (np. gorących napojów), stanu błony

śluzowej i dopasowania protezy.

- Podczas prawidłowego użytkowania kremu może naturalnie dochodzić do połykania niewielkich ilości kremu, co nie jest szkodliwe dla organizmu.
- Przy podanym sposobie używania krem można stosować długotrwale.

Czyszczenie protezy i jamy ustnej:

1. Wypłukać jamę ustną wodą. Delikatnie poruszyć protezę i wyjąć.
2. Jeśli na protezie lub w jamie ustnej pozostają resztki kremu, należy je usunąć za pomocą wacika zwilżonego ciepłą wodą lub olejem jadalnym.
3. Delikatnie oczyścić dziąsła i podniebienie przy pomocy miękkiej szczoteczki.
4. Protezę oczyścić z resztek jedzenia przy pomocy miękkiej szczoteczki do zębów i Pasty Protefix® HIGIENA. Dokładnie opłukać pod bieżącą wodą.

Składniki:

mieszanina soli sodowych i wapniowych kopolimeru eteru metylowinyloвого i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu, mentol, azorubina, benzoesan metylu

Stosowanie:

Sposób stosowania kremu:

1. Krem mocujący nałożyć na oczyszczoną, wilgotną lub suchą protezę.
2. Nakładać małą ilość kremu (krótkimi odcinkami), w odstępach jak na rysunku. Potrzeba kilku prób, aby ustalić jaka ilość kremu jest konieczna, a jednocześnie nie wypływa spod protezy.
3. Protezę założyć, przycisnąć, a następnie lekko przygryźć. Krem działa natychmiast po zastosowaniu.
4. Po otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu. Należy usunąć nadmiar oleju poprzez wyciśnięcie go z tubki; nie wpływa to na siłę mocującą kleju.
5. Po użyciu należy starannie zamknąć tubę, uważając by nie dostała się do niej woda. Wilgoć po dostaniu się do tuby może spowodować stwardnienie kremu mocującego.

Podmiot odpowiedzialny:

Queisser Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa