

Protefix krem mocujący Ekstra - Stark, 47 g



Cena: 11,37 zł

Opis słownikowy

Postać	Krem
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

PROTEFIX HALF - CREME EXTRA-STARK imp.

Niemiecki krem do protez zębowych

Protefix Haftcreme Extra Stark 40g

Niemiecki markowy krem do mocowania protez zębowych. Świeży smak, szybkie i mocne działanie. Zapewnia mocne wilgotne mocowanie. Komfort noszenia. Skutecznie uszczelnia krawędzie protezy. Używać na wcześniej oczyszczonej, najlepiej za pomocą tabletek i osuszonej protezie. Nanieść cienką warstwę kremu. Założyć protezę i kilka sekund dociskać. Odczekać kilka sekund a następnie swobodnie używać.

Rozpocząć stosowanie od jak najmniejszej ilości kremu. Zwiększać ilość, tylko jeśli jest to konieczne. Zbyt duża ilość kleju powoduje boczny obrzęk. Jeśli pęcznieje, zmniejszyć ilość, aż znajdzie się odpowiednią dawkę. Stosować tylko raz dziennie. Jeśli nastąpią podrażnienia, uszkodzenia skonsultować ze stomatologiem

Aplikować w następujący sposób:

Wyczyść i osusz protezy.

Nie nakładaj kremu małymi paskami zbyt blisko krawędzi protezy.

Wypłucz usta wodą, włóż protezę, naciśnij krótko i ugryź mocno przez kilka sekund, aby zapewnić bezpieczne dopasowanie.

Usunąć w następujący sposób:

Wypłucz usta wodą.

Zwolnij powoli protezę, wykonując ruchy wstrząsające.

Usuń resztki kremu klejącego za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.

Następnie wyczyść za pomocą tabletek Corega i spłucz.

instrukcje dotyczące przechowywania

Ważne: Chronić przed dziećmi. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Jeśli jest niezgodny, zaprzestań używania. Przy normalnym użytkowaniu możliwe jest połknięcie niewielkiej ilości kleju, co jest nieszkodliwe. Źle dopasowana proteza może mieć negatywne konsekwencje zdrowotne. Regularnie odwiedzaj swojego dentystę, aby sprawdzić swój protetyczny krój. Należy dbać o czyste i szczelne zamknięcie tubki. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Opis:

Krem mocujący Protefix to wyrób medyczny, przeznaczony do mocowania protez zębowych pełnych i częściowych.

Uwagi:

Protefix krem mocujący ma wielotorowe działanie, zapewniające poczucie pewności i komfortu na cały dzień. Dzięki silnemu działaniu mocuje protezę na dłużej działa natychmiastowo, nawet na wilgotnej protezie skutecznie uszczelnia przed drobinkami jedzenia.