

Protefix Protect Żel kojąco-regenerujący do dziąseł, 10 ml

Cena: 18,00 zł



Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Cechy:

- Zmniejsza bolesność;
- Przyspiesza gojenie;
- Przeciwdziała stanom zapalnym i owrzodzeniom;
- Przyspiesza gojenie odleżyn i otarć błony śluzowej.

Pojemność: 10ml

Zastosowanie:

Szczególnie polecany dla pacjentów noszących protezy zębowe lub aparaty ortodontyczne.

PROTECT żel działa potrójnie:

- 1) kojąco: szybko zmniejsza bolesność podrażnionych miejsc; działa przeciwzapalnie;
- 2) regenerująco: przyspiesza odnowę nabłonka jamy ustnej;
- 3) ochronnie: pokrywa nabłonek specjalną ochronną warstwą lipidową: chroni przed dalszymi urazami.

Skuteczność udokumentowana badaniami klinicznymi.

Preparat oparty na naturalnych składnikach. Nie zaburza naturalnej flory bakteryjnej. Nie wywołuje uczucia zdrętwienia ani innych efektów ubocznych wielu środków przeciwzapalnych lub miejscowo znieczulających. Umożliwia codzienne stosowanie.

Składniki:

glyceroloxidriester (93%); substancje dodatkowe: krzemionka koloidalna, sacharynian sodu, olejek goździkowy, olejek miętowy.

Stosowanie:

Wycisnąć niewielką ilość żelu na wacik lub czystą opuszkę palca i chwile masować dziąsła lub inne podrażnione miejsce. Stosować 3-4 razy dziennie. Nie jeść i nie pić około 15 minut po zastosowaniu. Po użyciu szczelnie zamknąć opakowanie.

W wypadku przedłużających się dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Queisser Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa