

Puwer Test Ciężowy Płytkowy, 1 szt.

Cena: 1,83 zł



Opis słownikowy

Postać	Test
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PUWER POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Nazwa

Test ciążowy Puwer

Kategoria

Wyrób medyczny

Skład

-

Opakowanie

1 płytka testowa / 1 pipetka do pobrania próbki / 1 instrukcja użycia

Opis produktu

Test ciążowy płytkowy PUWER jest prostym i szybkim w obsłudze testem.

Test wykrywa obecność hormonu hCG w moczu już o stężeniu na poziomie 10 mIU/ml.

Wzrost poziomu hCG rozpoczyna się w momencie zagniędzenia zarodka, dlatego test wykonać już w pierwszym tygodniu od spodziewanego momentu zapłodnienia. Najpewny wynik da jednak po dniu spodziewanej miesiączki.

Instrukcja obsługi

Badanie wykonuje się ze świeżo pobranego moczu. Do badania najlepiej nadaje się moc poranny. Badany mocz należy pobrać do czystego i suchego pojemniczka. Wyjść test z opakowania.

Wypakować pipetę i test ciążowy, który należy położyć na płaskiej, poziomej powierzchni. Zanurzyć końcówkę pipety w pojemniku z próbką moczu i pobrać próbkę. Umieścić w o

testu 4 krople pobranego moczu i po?o?y? test na p?askiej powierzchni. Odczeka? 3 m
odczyta? wynik. Pozytywny wynik widoczny jest ju? po 1 minucie.

Nie nale?y bra? pod uwag? wyniku otrzymanego po czasie d?u?szym ni? 10 minut. Opi
wyników zamieszczony jest na opakowaniu oraz w instrukcji.

Przechowywanie
Dodatkowe informacje
Producent

-
Instrukcja u?ycia
Puwer Polska sp. z o.o., ul. Narutowicza 94, 97-300 Piotrków Trybunalski