

Pyralgina Thermo Hot plaster rozgrzewający, 1 szt.



Cena: 3,22 zł

Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Pyralgina Thermo Hot to silnie rozgrzewający plaster przynoszący ulgę w bólach pleców, szyi, ramion, krzyża, a także w bólach reumatycznych.

Skład

Sproszkowane żelazo, woda, sól, węgiel aktywowany, wermikulit.

Zawartość opakowania

W opakowaniu znajduje się 1 plaster o wymiarach 13 x 9,5 cm.

Działanie:

Po otwarciu opakowania sproszkowane żelazo zaczyna się powoli utleniać, co powoduje wydzielenie ciepła (reakcja egzotermiczna). Pyralgina Thermo Hot wykazuje skuteczność działania do 14 godzin, jednak optymalny efekt rozgrzewający trwa do 12 godzin.

Wskazania:

Produkt wskazany jest do naturalnego rozluźnia głębokich partii mięśni, dzięki czemu przynosi ulgę w bólach pleców, ramion, krzyża, szyi, ścięgien, a także w przypadku bólu reumatycznego.

Sposób użycia wyrobu medycznego:

1. Ostrożnie otwórz opakowanie z plastrem.
2. Zdejmij taśmę zabezpieczającą powierzchnię klejącą i plaster w miejsce bólu. Produkt przykleić można na czystą, suchą skórę lub na bawełnianą bieliznę bezpośrednio przylegającą do ciała.
3. Zdjąć taśmę zabezpieczającą powierzchnię klejącą plastra i niezwłocznie przykleić plaster w miejscu, odczuwania bólu na

bawełnianą bieliznę przylegającą do ciała lub na suchą i czystą skórę.
4. Produkt stopniowo będzie się rozgrzewał, aż do uzyskania temperatury około 50°C.

Stosowanie produktu:

Długość stosowania plastra należy dobrać indywidualnie w zależności od potrzeb, kolejny plaster w tym samym miejscu nakleić można dopiero po upływie 24 godzin.

Wyrób można stosować sam lub w połączeniu z doustnymi lekami przeciwbólowymi, jednak w tym przypadku plaster należy stosować wyłącznie na bawełnianą bieliznę.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie należy wywierać dużego nacisku na plaster.

Nie stosować podczas kąpieli, w trakcie snu, na podrażnionej lub uszkodzonej skórę, w miejscach po zastrzyku lub w miejscach szczególnie wrażliwych (np. pachwiny, okolice dołów pachowych i pachwin).

U pacjentów starszych, niepełnosprawnych lub upośledzonych, którzy nie mogą sobie sami usunąć plastra, produkt należy stosować pod kontrolą.

Nie stosować u osób które nie są w stanie odczuwać ciepła, u których występuje skłonność do owrzodzeń skóry, w miejscach bezpośrednio po urazie lub tam, gdzie zastosowano miejscowe formy leków (maści, kremy, żele).

Nie należy przecinać i rozdzierać plastra.

Uwagi i środki ostrożności:

Nieprawidłowe stosowanie plastra może doprowadzić do uszkodzenia skóry.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia krążenia (zwłaszcza u osób przyjmujących leki rozszerzające naczynia obwodowe), cukrzyca, zapalenie stawów, choroby skóry lub ciąża, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem jeśli doszło do połknięcia lub kontakty zawartości plastra ze skórą, bądź oczami.

W przypadku odczuwania zbyt silnego ciepła, pieczenia, bólu w miejscu aplikacji wyrobu lub jeśli doszło do podrażnienia skóry, plaster należy natychmiast usunąć.

Produkt jednorazowy - po zużyciu należy go wyrzucić.

Przechowywać w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu, w temperaturze pokojowej.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Podmiot odpowiedzialny

POLPHARMA S.A.

Pełplińska 19

Starogard Gdański