

# Raniseptol blizny, żel, 20 ml



Cena: 22,00 zł

## Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### RANISEPTOL BLIZNY 20ml SILIKONOWY ZEL N/BLIZNY

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

#### OPIS:

Raniseptol to silikonowy żel na blizny przeznaczony do stosowania miejscowego w celu wspomagania leczenia blizn różnego pochodzenia. Stosowany systematycznie wspomaga leczenie blizn przerostowych i bliznowców (keloidów), pomaga zapobiegać nieprawidłowemu bliznowaceniu ran zamkniętych oraz łagodzić objawy związane z bliznami, jak uczucie napięcia czy swędzenie.

Poprawia wygląd blizny, zmniejsza ją i rozjaśnia. Łagodzi świąd, znosi uczucie napięcia i tym samym poprawia jakość życia pacjenta. Regularne stosowanie żelu poprawia wygląd blizn zarówno świeżych jak i starych.

Raniseptol blizny zalecany jest wspomagająco w leczeniu:

- blizn po zabiegach chirurgicznych i operacjach ( w tym blizny po cesarskim cięciu),
- blizn po operacjach plastycznych i zabiegach laserowych,
- blizn po oparzeniach,
- blizn potrądzikowych,
- blizn pourazowych,
- blizn przerostowych,
- bliznowców (keloidów),
- rozstępów.

Preparat może być stosowany pod makijaż.

#### **SPOSÓB UŻYCIA:**

Stosowanie preparatu powinno rozpocząć się po całkowitym zagojeniu rany i po zdjęciu ewentualnych szwów.

Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieść niewielką ilość żelu i masować ją kolistymi ruchami przez około 2-3 minuty. Należy rozcierać bliznę lekko uciskając ją opuszkami palców. Pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem okrycia wierzchniego.

Zaleca się stosowanie żelu minimum 2 razy dziennie.

#### **SKŁAD:**

Mieszanka polisiloksanów, dwutlenek krzemu.

#### **Stosowanie**

Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieść niewielką ilość żelu i masować ją kolistymi ruchami przez około 2-3 minuty. Należy rozcierać bliznę lekko uciskając ją opuszkami palców. Pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem ewentualnych szwów.

#### **Interakcje**

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami czy wyrobami medycznymi, jednak przed aplikacją wyrobu nie należy na bliznę stosować żadnych innych leków, wyrobów medycznych ani płynów. Preparat zawsze należy stosować na czystą i suchą skórę.

#### **Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią**

Przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

#### **Działania niepożądane**

Raniseptol Blizny jest dobrze tolerowany i brak jest danych o działaniach niepożądanych po jego zastosowaniu.

W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

#### **Przechowywanie**

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i ognia. Chronić przed promieniami słonecznymi. Nie zamrażać, nie przechowywać w lodówce.

Nie stosować wyrobu medycznego Raniseptol blizny po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

PRODUCENT: Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.

ADRES PRODUCENTA: ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa