

# Remo-Wax Krople do usuwania woskowiny usznej, krople do uszu, roztwór, 10 ml (+ gumowa gruszka)



Cena: 21,76 zł

## Opis słownikowy

Postać	Krople
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ORION PHARMA POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis

Preparat służy do zapobiegania powstawaniu korka woskowinowego, lub usuwania już powstałego poprzez rozpuszczanie woskowiny. Zawiera naturalne, bezpieczne substancje, m.in. alantoinę i lanolinę.

### Skład

Krople: Alantoina, lanolina etoksylovana, polisorbata 80, polisorbata 60, sorbitol ciekły, syrop fruktozowy, eter polioksyetyleno-stearylowy, eter polioksyetyleno-oleilowy, olej lanolinowy, mirystynian izopropylu, olej z tłuszczu norek, alkohol feniloetylowy, alkohol cetylowy, butylowany hydroksytoluen, kwas sorbowy, chlorek benzetonowy, woda.

Gruszka: polichlorek winylu (PVC).

### Zawartość opakowania:

Remo-Wax® 10 ml z gumową gruszką.

Opakowanie zawiera wszystko, co niezbędne do wykonania zabiegu.

### Wskazania

Krople do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax rozpuszczają korek woskowinowy i zapobiegają jego powstawaniu.

### Sposób użycia wyrobu medycznego

Rozpuszczanie korka woskowinowego przy użyciu kropli do uszu:

1. Ogrzać zawartość butelki Remo-Wax do temperatury ciała (około 37°C) przez zamknięcie butelki w dłoni na kilka minut.
2. Przechylić głowę w kierunku barku lub położyć się z głową zwróconą na bok i podać do ucha od 10 do 20 kropli Remo-Wax.

- Pociągnąć delikatnie płatek ucha w górę i w dół kilka razy, wykonując ruch obrotowy. Można wprowadzić do ucha mały tampon z bawełny zwilżony kilkoma kroplami Remo-Wax.
3. Pozostawić Remo-Wax w uchu przez 20 do 60 minut. W razie potrzeby można pozostawić roztwór w uchu na noc.
  4. Po użyciu kropli do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax przewód słuchowy musi zostać przepłukany. W celu przepłukania uszu można użyć gruszki gumowej Remo-Wax lub udać się do lekarza lub pielęgniarki.
  5. Zaleca się by płukanie uszu u dzieci było wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę.

#### Płukanie ucha przy użyciu gumowej gruszki:

1. Gruszkę należy umyć i przepłukać przed każdym użyciem.
2. Nabrać do gruszki wody o temperaturze ciała.
3. Wsunąć ostrożnie końcówkę gruszki do kanału słuchowego na głębokość kilku milimetrów i płukać ucho, delikatnie i bez pośpiechu ściskając gruszkę.
4. Nie należy wprowadzać końcówki gruszki w głąb przewodu słuchowego!
5. Powtórzyć płukanie kilka razy, aż woda wypływająca z ucha będzie zupełnie czysta.
6. Po zakończonym zabiegu gruszkę należy umyć i wycisnąć do pusta w celu usunięcia zawartości. Należy pozostawić gruszkę, kierując końcówkę gruszki do dołu, tak aby znajdująca się w niej woda mogła wypłynąć. Jeśli nie udało się rozpuścić korka woskowinowego, podawanie kropli i płukanie uszu można powtarzać przez kolejne trzy dni.
7. Stosując Remo-Wax regularnie raz w miesiącu można uniknąć ponownego powstania korka woskowinowego. **Uwaga!** Należy przepłukać ucho po każdym zabiegu.
8. Jeśli pacjent ma zamiar odwiedzić lekarza lub pielęgniarkę w celu wykonania płukania ucha, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

**Uwaga:** Płukanie ucha nie powinno powodować bólu. Jeśli pacjent odczuwa ból, należy przerwać płukanie ucha i skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem kropli Remo-Wax należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

#### **Przeciwwskazania i środki ostrożności**

##### Przeciwwskazania do stosowania preparatu:

- stan zapalny lub ból ucha,
- wydzielina z ucha,
- uszkodzona, przedziurawiona lub przebita błona bębenkowa (np. dren po nakłuciu błony bębenkowej),
- uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników kropli Remo-Wax.

#### **Środki ostrożności dla pacjentów o specjalnych potrzebach:**

Jeśli pacjent ma problemy z koordynacją, zaburzenia ruchowe lub drżenie rąk, należy poprosić kogoś o podanie kropli do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax do przewodu słuchowego i przepłukanie uszu zgodnie z instrukcją.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego, należy go umieścić na miejscu dopiero po zakończeniu płukania i wypłynięciu wody z ucha.

#### **Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego**

W rzadkich przypadkach występowały reakcje alergiczne związane z kroplami Remo-Wax. Może wystąpić nieprzyjemne uczucie w kanale słuchowym, podrażnienie skóry i przemijające zawroty głowy. Jeśli gumowa gruszka jest wsunięta głęboko do przewodu słuchowego, może dojść do uszkodzenia błony bębenkowej.

W przypadku podejrzenia, że krople do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax spowodowały działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

#### **Uwagi**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

#### Stosowanie u dzieci i młodzieży

Remo-Wax może być stosowany u dzieci według uznania lekarza. Należy postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. W celu wykonania płukania uszu u dzieci zaleca się odwiedzenie lekarza lub pielęgniarki środowiskowej.