

Sanity Termofor gumowy w pokrowcu 2 l, 1 szt.



Cena: 33,21 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

Opis produktu

Opis:

Właściwości i zastosowanie:

Wyrób medyczny przeznaczony do profilaktyki i łagodzenia dolegliwości bólowych, stanów chorobowych i przeziębień u osób dorosłych. Produkt został wykonany z naturalnej gumy wysokiej jakości.

Opakowanie zawiera: gumowy termofor w pokrowcu (1 szt.). **WZÓR I KOLOR WYSYŁANY LOSOWO!**

Przeznaczenie:

Wyrób medyczny należy stosować w celu ogrzewania ciała, zmniejszania dolegliwości bólowych, a także leczenia w warunkach domowych przeziębień i innych stanów chorobowych.

Sposób użycia:

1. Produkt napełnić wodą o temperaturze 50oC do $\frac{3}{4}$ jego objętości.
2. Nadmiar powietrza usunąć, przechylając termofor do momentu, aż w jego wylocie będzie widoczna woda.
3. Kurek zakręcić i założyć pokrowiec.

Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z ulotką/instrukcją użycia dołączoną do wyrobu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Wyrób należy opróżnić z wody po użyciu i powiesić do osuszenia wletem do dołu.
Przechowywać w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu, nie zakręcając korka.
Stosowanie wyrobu przez dzieci powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
W przypadku zniszczenia jednej z części produktu, należy wyrzucić cały wyrób.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa stosowania znajdują się w ulotce/instrukcji użycia do wyrobu medycznego.

Producent
ALBERT POLSKA
Obwodowa 4a
Dobczyce