

Sanity Termofor gumowy w pokrowcu hipopotam 0,7l, 1 szt.



Cena: 27,29 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

Opis produktu

Opis:

Wskazania do stosowania:

Stosowany w celach profilaktyczno-leczniczych do miejscowego ogrzewania ciała pacjenta.

Sposób użycia:

1. Przygotuj ciepłą wodę o temperaturze ok. 50° Nie stosuj wrzątku oraz wody mogącej wywołać oparzenie. Odkręć zakrętkę i powoli napełnij termofor wodą do $\frac{3}{4}$ jego objętości. W trakcie napełniania trzymaj termofor za szyjkę w pozycji pionowej.
2. Pozbądź się nadmiaru powietrza, poprzez powolne przechylanie termoforu, aż do momentu, w którym w jego wylocie będzie widoczna woda. Dla wygody możesz oprzeć termofor na płaskiej powierzchni.
3. Zakręć dokładnie kurek i sprawdź jego szczelność odwracając termofor do dołu. Następnie załóż pokrowiec.
4. Po użyciu wylej wodę i powieś termofor wlewnem do dołu, w celu jego osuszenia. Przechowuj bez zakręcania korka w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu. Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikaj kontaktu z urządzeniami grzewczymi i przechowywania w wysokiej temperaturze lub na słońcu.

Czyszczenie:

Pokrowiec wykonany jest z poliestru. W razie jego zabrudzenia prać ręcznie, używając mydła i wody o temperaturze 30°C. Termofor gumowy przemywać wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Termofor może być używany przez dzieci zawsze pod nadzorem osoby dorosłej. Nie obciążaj termoforu gdy jest on napełniony wodą. Nie siadaj na nim, nie kładź ciężkich przedmiotów. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w termoforze oraz na nim. Przed użyciem każdorazowo sprawdź wyrób pod kątem zużycia lub uszkodzeń mechanicznych. W razie zniszczenia jednej z części, należy wyrzucić cały wyrób. Zutylicuj go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

Nie stosować wrzątku oraz wody mogącej wywołać oparzenie. Unikać długiego bezpośredniego kontaktu wyrobu ze skórą. Nie siadać na termoforze.

Stosowanie termofora u dzieci należy zawsze przeprowadzić pod nadzorem osoby dorosłej. Nie umieszczać żadnych przedmiotów na termoforze.

Regularnie kontrolować wyrób pod kątem zużycia lub uszkodzeń. W razie ewentualnego uszkodzenia jednej z części, zniszczyć oraz wyrzucić cały wyrób.

Przechowywać bez zakręcenia korka w suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Zachować instrukcję użytkowania.

W przypadku zabrudzeń termofor myć wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących. Wyrób nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej. Pokrowiec prać ręcznie w wodzie o temperaturze do 40 st.C.