

# Sanity Zakraplacz do oczu, 1 szt.

Cena: 5,13 zł



## Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

## Opis produktu

### Opis:

#### **Właściwości i zastosowanie:**

Wyrób medyczny, który jest prosty i łatwy w użyciu. Wyrób jest higieniczny oraz pozwala odmierzyć, a także zaaplikować odpowiednią ilość płynu. Jest to przyrząd, który warto mieć w domowej apteczce.

Opakowanie zawiera szklany zakraplacz.

#### **Przeznaczenie:**

Wyrób medyczny przeznaczony jest do przenoszenia i odmierzania płynów oraz ich bezpiecznego aplikowania do oka, ucha lub nosa.

#### **Sposób użycia:**

Przed pierwszym oraz każdym następnym użyciem obie części zakraplacza należy rozdzielić i zanurzyć w całości w gotującej się wodzie na kilka minut. Ściśnij ssawkę i zanurz końcówkę zakraplacza w przygotowanym płynie, a następnie zassij go poprzez zwolnienie nacisku. Aplikuj odpowiednią dawkę poprzez ściśnięcie balonika tak, aby ciecz wydawała się kroplami przez otwór na końcu rurki.

Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z ulotką/instrukcją obsługi/instrukcją użycia dołączoną do wyrobu.

#### **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Podczas zabiegu zachowaj bezpieczną odległość wyrobu od oka.

Unikaj bezpośredniego kontaktu rąk z końcówką zakraplacza.

Rodzaj zastosowanego roztworu/leku zawsze skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.

Nie stosuj środków dezynfekujących.

W razie uszkodzenia wyrobu należy go wyrzucić.

Trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

