

Seni Man Normall Level 2, wkładki anatomiczne, 15 szt.



Cena: 18,02 zł

Opis słownikowy

Postać	Wkładki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpiecze?stwa u?ywyj go zgodnie z instrukcj? lub etykiety?. W przypadku w?tpliwo?ci skonsultuj si? ze specjalist?.

WKŁADKI UROLOGICZNE SENI MAN Normal Level 2*15szt

NOWOŚĆ. Wkładki urologiczne dla mężczyzn Seni Man Normal Level 2 15szt.

Opis produktu

Wkładki urologiczne Seni Man Normal Level 2 stworzone z myślą o mężczyznach prowadzących aktywny tryb życia, ceniących sobie komfort, bezpieczeństwo oraz dyskrecję.

Wkładki urologiczne Seni Man Normal Level 2 to skuteczna ochrona dla mężczyzn z lekkim nietrzymaniem moczu.

Zalety produktu:

- Wkładka kształtem przypominająca ochraniacz bokserski.
- Ochrona przed wyciekami dzięki konstrukcji dopasowanej do męskiej anatomii.
- Poczucie suchości zapewnia dyskretny, kompaktowy wkład chłonny.
- Kontrola zapachu – superabsorbent użyty we wkładkach, obok silnych właściwości chłonnych, ma również właściwości antybakteryjne, dzięki czemu redukuje rozwój bakterii odpowiadających za powstawanie nieprzyjemnego zapachu.
- Łatwe zakładanie i pewne - potrójne - mocowanie za pomocą pasków klejowych (jeden pośrodku wzdłuż wkładki i dwa punktowe po bokach przy górnej krawędzi)
- Miękkość i dyskrecja – wkładki nie szeleszczą i są delikatne dla skóry.
- Oddychalność - wkładki pozwalają skórze swobodnie oddychać.
- Bez lateksu – zminimalizowane ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Płeć: męczyzna

Stan fizyczny: męczyzna aktywny, samodzielny

Rodzaj inkontynencji: inkontynencja moczowa

Stopień inkontynencji i poziom chłonności: inkontynencja: lekka, średnia
chłonność: 5/5

Właściwości wkładek urologicznych Seni Man Super

Komfortowe poczucie suchości - Wkładki dla mężczyzn Seni Man Super to wyroby chłonne dedykowane inkontynencji lekkiej i średniej. Skutecznie absorbują wyciek moczu, dając gwarancję komfortowego poczucia suchości w każdej sytuacji.

Doskonałe dopasowanie do męskiego ciała - Dzięki anatomicznemu kształtowi wkładki dopasowują się do ciała, zmniejszając tym samym ryzyko otarć mechanicznych. Takie dopasowanie gwarantuje zachowanie dyskrecji i wygody, ponieważ wkładki stają się niewidoczne pod ubraniem. Dodatkowo, wkładka posiada elastyczne, piankowe elementy wzdłuż boków, które chronią przed wyciekami.

Brak podrażnień i reakcji alergicznych - Specjalna struktura warstwy zewnętrznej wkładek umożliwia swobodny przepływ powietrza przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu cieczy, dzięki czemu skóra może swobodnie oddychać. Oddychalność wyrobu sprawia, że powstaje mniej podrażnień, co potwierdzają niezależne badania dermatologiczne.

Zapobieganie powstawaniu nieprzyjemnego zapachu - Superabsorbent użyty we wkładkach, obok silnych właściwości chłonnych, ma również właściwości antybakteryjne, dzięki czemu redukuje rozwój bakterii odpowiadających za powstawanie nieprzyjemnego zapachu.

Zakładanie wkładek urologicznych Seni Man Super

Wyjmij wkładkę urologiczną z opakowania.

Rozwiń wkładkę.

Odchyl osłonki boczne.

Usuń papier z paska klejowego na zewnętrznej części wkładki.

Umieść wkładkę wewnątrz bielizny paskiem klejowym do dołu. Przyklej wkładkę do bielizny.

Nie stosuj wkładek razem z luźną bielizną typu bokserki.

Wymiary produktu: 19x23,5 cm

Sposób przechowywania: bez specjalnych zaleceń

WKŁADKI UROLOGICZNE SENI MAN Normal Level 2*15szt TO WYRÓB MEDYCZNY. DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ LUB ETYKIETĄ. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SKONSULTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ.

TZMO S.A.

ŻÓŁKIEWSKIEGO 20/26

87-100 Toruń