

# Sinulan Rinse - zestaw do płukania nosa i zatok, irygator, 12 sasz. (+ irygator)



Cena: 22,27 zł

## Opis słownikowy

Postać	Saszetki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	STADA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis produktu

Sinulan Rinse to wyrób medyczny przeznaczony do płukania nosa i zatok odpowiedni do stosowania przez osoby dorosłe, jak również u dzieci powyżej 4 roku życia. Zestaw zawiera saszetki z rozpuszczalnym chlorkiem sodu do sporządzenia izotonicznego lub hipertonicznego roztworu przeznaczonego do płukania nosa i zatok.

### Wskazania do stosowania:

Roztwór hipertoniczny chlorku sodu przygotowany z zastosowaniem zestawu Sinulan Rinse zalecany jest do stosowania w przypadku obrzęku nosa towarzyszącemu nieżytowi nosa w trakcie infekcji lub alergii, a także w przebiegu zapalenia zatok.

Natomiast roztwór izotoniczny chlorku sodu przeznaczony jest do utrzymania prawidłowej higieny nosa oraz w przypadku zapalenia zatok przynosowych, nieżytu nosa, przed i po zabiegach chirurgicznych, jak również po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu w powietrzu.

Konstrukcja irygatora Sinulan Rinse umożliwia płukanie nosa i zatok w łatwy i kontrolowany sposób, bez konieczności użycia dodatkowej siły i ściskania butelki.

### Zastosowanie

Płukanie nosa i zatok u dzieci po 4 roku życia i osób dorosłych:

- w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych zatok przynosowych,
- w nieżytach nosa spowodowanych alergią lub infekcją,
- przed przeprowadzaniem zabiegów chirurgicznych w obrębie nosa i zatok,

- po tych zabiegach,
- w celu płukania nosa z alergenów, bakterii, wirusów i zanieczyszczeń powietrza (smog),
- w celu utrzymywania prawidłowej higieny nosa i zatok.

### Sposób użycia

- Umyj i osusz ręce.
- Upewnij się, że wszystkie elementy butelki do irygacji są czyste.
- Wsyp do niej zawartość 1 saszetki wyrobu Sinulan Rinse.
- Nalej do butelki przegotowanej wody o temperaturze około 37°C w odpowiedniej ilości.
- Dokładnie zakręć nakrętkę na butelce.
- Zakryj otwór u szczytu nakrętki palcem i wstrząśnij kilka razy irygatorem, aby proszek całkowicie rozpuścił się w wodzie.
- Stań nad umywalką i pochyl się lekko do przodu.
- Oddychaj swobodnie przez usta (przez cały czas wykonywania płukania).
- Przyłóż końcówkę nakrętki do otworu nosowego.
- Ściśnij butelkę płynnym ruchem, wprowadzając w ten sposób roztwór do jamy nosowej i zatok.
- Wykorzystaj połowę roztworu, który wypłynie drugim otworem nosowym wraz z wypłukiwaną wydzieliną.
- Powtórz opisane wyżej czynności dla drugiego otworu nosowego.
- Nie połykaj roztworu.
- Po wypłukaniu nosa i zatok delikatnie wydmuchaj nos w chusteczkę higieniczną.
- Pozostałość roztworu wylej.
- Po przeprowadzonej irygacji starannie umyj i osusz wszystkie elementy butelki.

### Składniki

Chlorek sodu.

### Przeciwwskazania

*Nie stosować w przypadku:*

- o nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu medycznego,
- o całkowitej blokady nosa,
- o nieprawidłowego ustawienia przegrody nosowej,
- o niedrożnego przewodu słuchowego.

### Ważne wskazówki

- Możliwość wykonywania zabiegu płukania nosa i zatok z użyciem zestawu do irygacji Sinulan Rinse u dzieci poniżej 4 lat należy skonsultować z lekarzem.
- Należy również zasięgnąć porady lekarza przed wykonaniem płukania nosa i zatok w przypadku:
  - o infekcji ucha,
  - o po przebytej operacji ucha.
- Do płukania należy stosować tylko roztwór przygotowany bezpośrednio przed zabiegiem na bazie przegotowanej wody o odpowiedniej temperaturze zbliżonej do temperatury ciała.
- Ostatnie płukanie danego dnia należy przeprowadzić najpóźniej na godzinę przed położeniem się spać.
- W przypadku, gdy temperatura na dworze wynosi mniej niż 19°C, zaleca się przeprowadzenie płukania nosa i zatok nie później niż na godzinę przed wyjściem z domu.
- Stosowanie preparatu u dzieci należy przeprowadzać pod opieką odpowiedzialnej osoby dorosłej.
- Preparat Sinulan Rinse zestaw do płukania nosa i zatok można bezpiecznie stosować przez długi czas, jednak w przypadku, gdy po 7 dniach stosowania nie ma poprawy lub objawy pogorszyły się, należy zwrócić się o poradę do lekarza.
- Dla zachowania higieny zaleca się nie wymienić butelkę na nową po korzystaniu z niej przez 2-3 miesiące.

### Ostrzeżenia

- Nie stosować do iniekcji.
- Nie połykać.
- Nie należy stosować danej butelki u więcej niż jednej osoby, ponieważ może to skutkować rozprzestrzenieniem się infekcji.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

### Dodatkowe informacje

Zestaw do płukania nosa i zatok Sinulan Rinse zawiera:

- 1 x irygator,
- 12 x saszetka z chlorkiem sodu.

**Podmiot odpowiedzialny**

Stada Pharm Sp. z o.o.  
The Park Warsaw, ul. Krakowiaków 44  
02-255 Warszawa